

Navodila za uporabo oddajnika Unitron uTV™ 2



Hvala

Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali Unitron uTV™ 2.

Pri Unitron si prizadevamo lajšati težave ljudi, ki trpijo zaradi slušne prizadetosti. Skupaj s slušnimi akustiki iščemo napredne rešitve po meri za vsakogar.

Ker je sluh pomemben.

Vaš uTV 2

Slušni akustik: _____

Telefon: _____


Serijska številka oddajnika uTV 2: _____

Garancija: _____

Datum nakupa: _____

Vsebina pakiranja

Unitron uTV 2 vsebuje naslednje dele:

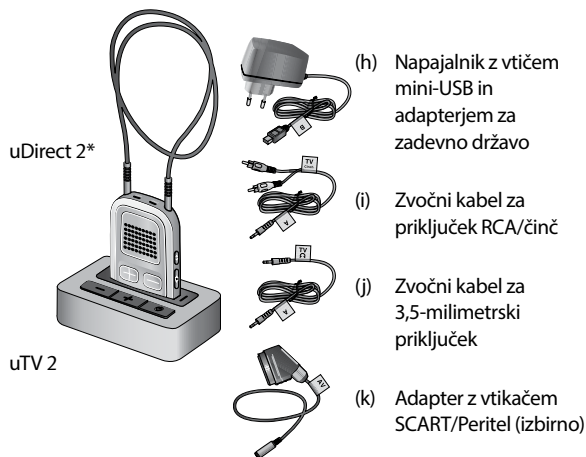

*Dodatna oprema uDirect 2 se prodaja posebej.




Opomba: V navodilih za uporabo sprejemno-oddajne naprave uDirect 2 najdete vse informacije o tej dodatni opre.

Kazalo

Opis oddajnika uTV 2	2
Prva uporaba	4
1. korak: Napajanje	4
2. korak: Priključitev oddajnika uTV 2	5
3. korak: Vkllop vseh naprav	10
4. korak: Povezovanje sprejemno-oddajne naprave uDirect 2 in oddajnika uTV 2	12
Dnevna uporaba oddajnika uTV 2	14
5. korak: Nošenje sprejemno-oddajne naprave uDirect 2	14
6. korak: Poslušanje televizijskega sprejemnika	15
7. korak: Uravnavanje glasnosti TV-signalov	16
8. korak: Začasna prekinitev in telefonski klici med delovanjem	18
9. korak: Izkllop naprav uTV 2 in uDirect 2	20
10. korak: Napajanje sprejemno-oddajne naprave uDirect 2	22
Preverjanje prenosa zvoka	25
Vodnik za odpravljanje težav	27
Pomembne informacije	30
Informacije o skladnosti	33
Informacije o simbolih in njihova razlaga	36

Opis oddajnika uTV 2

Unitron uTV 2 je namenjen brezžičnemu povezovanju vaših slušnih aparatov s televizijskim sprejemnikom ali drugimi zvočnimi napravami. Sistem je sestavljen iz treh glavnih delov: vašega slušnega aparata, sprejemno-oddajne naprave uDirect 2 in oddajnika uTV 2.

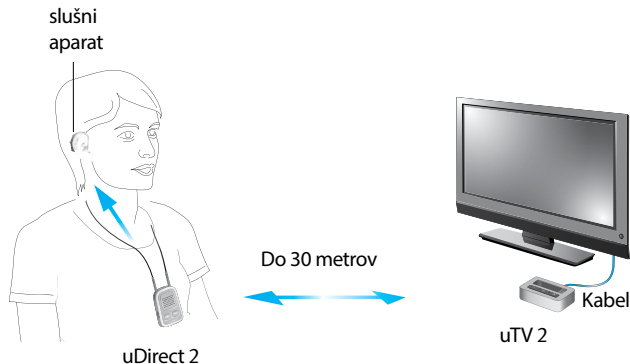


Oddajnik uTV 2 je priključen na vaš televizijski sprejemnik (ali drug zvočni vir) in brezžično oddaja zvočne signale iz vašega televizijskega sprejemnika, ki jih uDirect 2 sprejema na razdalji do 30 metrov. Poleg tega se uTV 2 uporablja tudi kot polnilna postaja za uDirect 2, kadar ta ni v uporabi.

Gumbi

- (a) Gumb za VKLOP/IZKLOP
- (b) Gumb za zvišanje glasnosti TV-signala
- (c) Gumb za znižanje glasnosti TV-signala

Priključki


- (d) Priključek za napajanje (mini-USB)
- (e) Priključek za vhodni zvočni signal (za 3,5-milimetrski vtič)
- (f) Polnilna reža za uDirect 2
- (g) Lučka, ki kaže stanje naprave

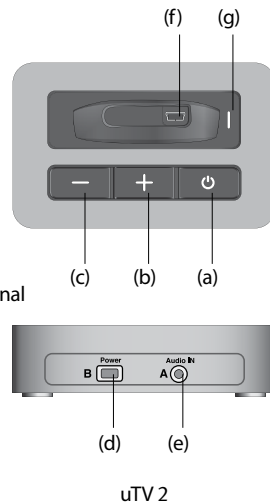


Prva uporaba

1. korak: Napajanje

1. Izberite adapter, ki je primeren za vašo državo.

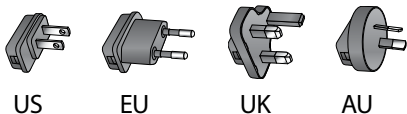

2. Okrogli rob adapterja vstavite do konca v okrogli rob napajalnika.
3. Potisnite spodnji del adapterja, da se zaskoči. Preverite, ali je adapter trdno nameščen.

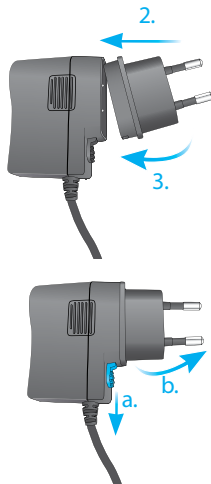

Če želite odstraniti napajalni adapter:

- a. Povlecite nazaj jeziček na univerzalnem napajalniku in ga zadržite;


- b. Nežno povlecite adapter navzgor, da ga odstranite iz napajalnika;
- c. Ponovite 1. korak (opisan zgoraj).

2. korak: Priključitev oddajnika uTV 2

Če želite priključiti napajalnik:


Postavite uTV 2 poleg televizijskega sprejemnika.

Vtaknite napajalnikov vtič mini-USB (d) v priključek za napajanje na oddajniku uTV 2. Vtaknite napajalnik v stensko vtičnico (h).

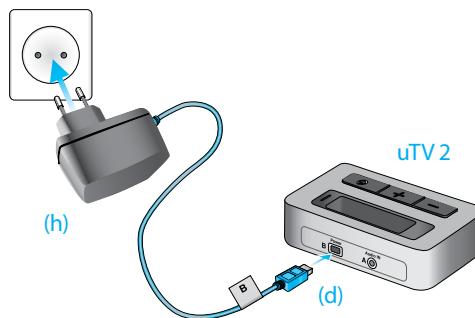

S kablom RCA/činč (i) priključite oddajnik uTV 2 na televizijski sprejemnik:


Vtaknite vtič za stereo (e) v priključek za vhodni zvočni signal (Audio IN) na oddajniku uTV 2. Vtaknite rdeči in beli vtič (i) v ustrezen rdeči in beli izhodni priključek na svojem televizijskem sprejemniku.

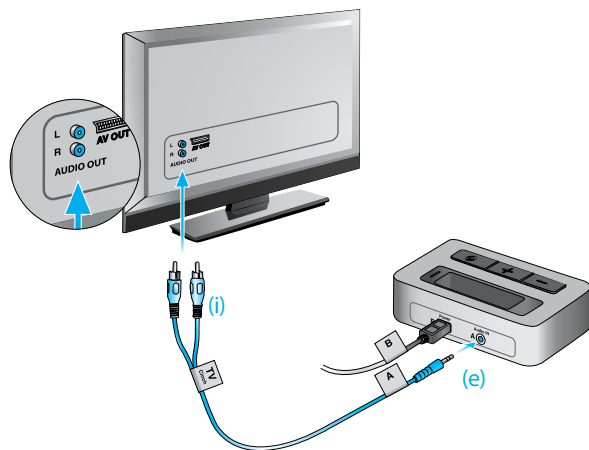

Oddajnik uTV 2 lahko priključite tudi z zvočnim kablom, ki ga vtaknete v priključek za slušalke na televizijskem sprejemniku:

Vtaknite vtič za stereo (e) v priključek za vhodni zvočni signal na oddajniku uTV 2 (Audio IN).

Vtaknite drugi konec kabla v izhodni priključek za slušalke na televizijskem sprejemniku.

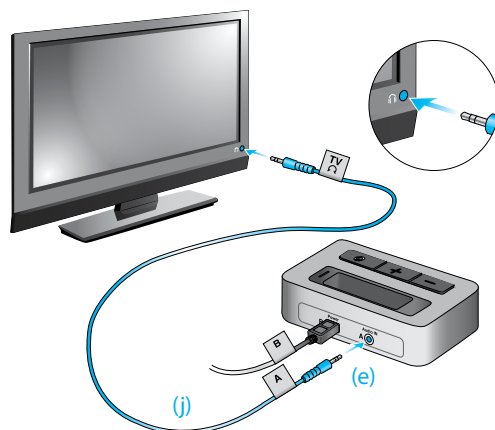


 Priključitev oddajnika uTV 2 na televizijski sprejemnik prek priključka za slušalke vam omogoča, da z daljinskim upravljalnikom za televizijski sprejemnik uravnavate glasnost zvoka.

 Pri nekaterih televizijskih sprejemnikih se bodo zvočniki izklopili, ko boste vtaknili vtič v priključek za slušalke, zaradi česar drugi ljudje ne bodo slišali televizijskega sprejemnika. V tem primeru uporabite izhodni priključek činč/RCA ali SCART, kot je opisano zgoraj. Za več informacij o uravnavanju glasnosti glejte 7. korak. Oddajnik uTV 2 se lahko s kablom z vtičem za stereo (j) priključi tudi na druge zvočne vire, kot so predvajalnik MP3, osebni računalnik ali hišni predvajalnik zvoka.

 Nekateri televizijski sprejemniki nimajo analognega izhodnega priključka za kable RCA. V tem primeru se lahko uTV 2 priključi na kabelski sprejemnik oziroma hišni stereosistem prek analognega izhodnega priključka za kabel RCA.

Namesto tega lahko uporabite tudi adapter z vtičnem SCART:

Vtaknite en konec zvočnega kabla (j) v uTV 2, drugi konec pa v adapter z vtičnem SCART. Nato vtaknite adapter z vtičnem SCART (k) v prost izhodni priključek za SCART na televizijskem sprejemniku.

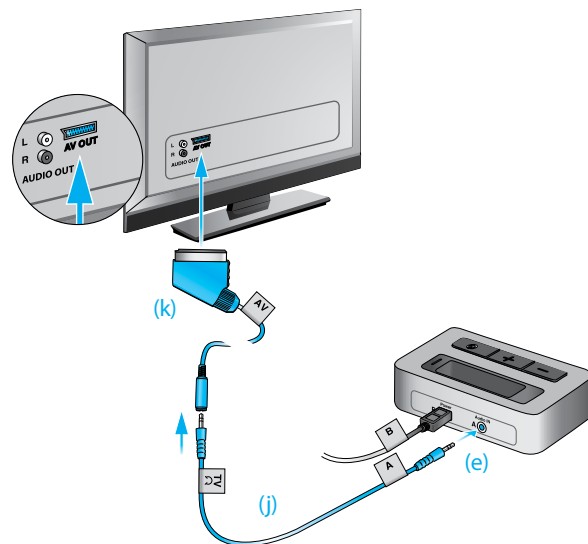

3. korak: Vkllop vseh naprav


Če želite uporabljati uTV 2, morate vklopiti vse naprave.

Vklopite televizijski sprejemnik ali drug zvočni vir.


Preverite, ali je slušni aparat vklopljen in pravilno nameščen.

Oddajnik uDirect 2 vklopite tako, da napajalno stikalo premaknete v položaj za vklop, kot je prikazano na sliki 1.

uDirect 2

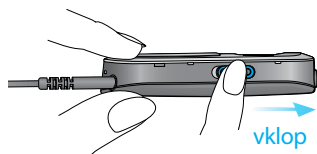


Slika 1

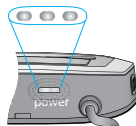

Vklopite uTV 2 tako, da na kratko pritisnete gumb za vklop/izklop (a), kot je prikazano na sliki 2. Lučka, ki kaže stanje naprave (g), bo na začetku zasvetila zeleno, pozneje pa lahko začne svetiti modro.

uTV 2

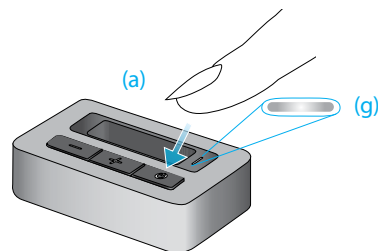

Slika 2



Če napajalna lučka na sprejemno-oddajni napravi uDirect 2 začne utripati rdeče ali če se sploh ne vključi, lahko to kaže na prazno baterijo sprejemno-oddajne naprave uDirect 2. V tem primeru najprej napolnite uDirect 2, kot je opisano v 10. koraku.



Za več pojasnil o lučkah na sprejemno-oddajni napravi uDirect 2 glejte navodila za uporabo sprejemno-oddajne naprave uDirect 2.

4. korak: Povezovanje sprejemno-oddajne naprave uDirect 2 in oddajnika uTV 2

Oddajnik uTV 2 in sprejemno-oddajno napravo uDirect 2 je treba pred uporabo povezati. Med postopkom povezovanja se določi, katere naprave s tehnologijo Bluetooth® se lahko med seboj sporazumevajo.

Preverite, ali sta obe napravi vklopljeni, kot je opisano v 3. koraku.




Med povezovanjem sprejemno-oddajne naprave uDirect 2 ni treba priklopiti na polnilno režo (f) na oddajniku uTV 2.



Postopek povezovanja posamezne naprave s sprejemno-oddajno napravo uDirect 2 se izvede samo enkrat.


1. Sočasno pritisnite ter 2 sekundi držite gumba  in  na sprejemno-oddajni napravi uDirect 2, dokler lučka za zvočni signal ne začne hitro utripati modro (slika 3). Vaš uDirect 2 bo še dve minuti oziroma do zaključka postopka za omogočitev povezovanja deloval v načinu povezovanja.

Slika 3

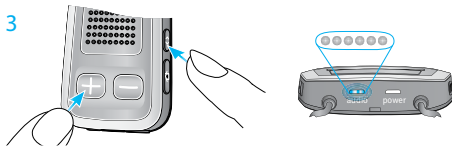

Pritisnite  in  ter ju držite 2 sekundi

2. Če lučka, ki kaže stanje (g) oddajnika uTV 2, ne utripa modro, pritisnite gumb za vklop/izklop (a) in ga držite 5 sekund, dokler lučka za Bluetooth (g) ne začne hitro utripati modro, kot je prikazano na sliki 4.

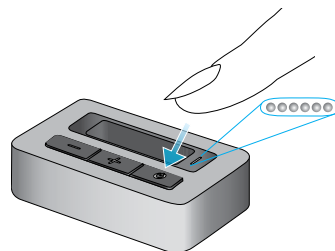

Slika 4

3. Počakajte, dokler obe lučki za Bluetooth (g) ne začneta neprekinjeno svetiti modro. To lahko traja do 2 minuti, vendar je običajno končano v nekaj sekundah.


Dnevna uporaba oddajnika uTV 2

Najprej vklopite obe napravi, kot je opisano v 3. koraku.

5. korak: Nošenje sprejemno-oddajne naprave uDirect 2

Pred vsakim prenosom telefonskega ali televizijskega zvoka oziroma glasbe je treba uDirect 2 vklopiti in ga pravilno namestiti, kot je prikazano v nadaljevanju:

1. Namestite vrvico okoli vratu (pomagate si lahko tako, da iz naprave iztaknete en vtič).
2. Preverite, ali sta oba vtiča pravilno vtaknjena v priključka za vrvico.
3. Vključite uDirect 2.

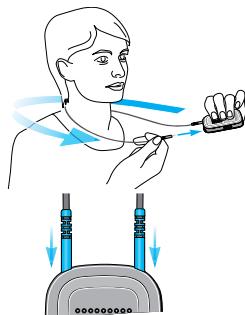

 Ob vklopu uDirect 2 samodejno prepozna vaš brezžični slušni aparat Unitron.

 Ob neželenem povezovanju z drugimi slušnimi aparati se posvetujte s slušnim akustikom.

6. korak: Poslušanje televizijskega sprejemnika

Vaš slušni aparat sprejema televizijski zvok prek sprejemno-oddajne naprave uDirect 2.

 Če kljub nameščenemu oddajniku uTV 2 ne slišite televizijskega zvoka, ponovite korake od 1 do 5.

Oddajnik uTV 2 omogoča delovanje tehnologije Bluetooth na razdalji do 30 m. Med sprejemno-oddajno napravo uDirect 2 in oddajnikom uTV 2 so lahko ovire. Kljub temu lahko vplivi okolja, denimo stene ali pohištvo, zmanjšajo območje delovanja.

Če se uDirect 2 znajde zunaj območja delovanja oddajnika uTV 2, bo brezžični prenos zvoka prekinjen. Če uDirect 2 nato znova pride v območje delovanja oddajnika uTV 2, bo samodejno nadaljeval prenos zvoka do vašega slušnega aparata.

 Samodejno nadaljevanje prenosa zvoka se bo začelo v 10 sekundah. Med prenosom zvoka morata obe lučki za prenos zvoka (g) neprekinjeno svetiti modro.



Če lučka, ki kaže stanje (g) oddajnika uTV 2:

utripa zeleno, preverite, ali je kabel ustrezno vtaknjen v priključek za vhodni zvočni signal na oddajniku uTV 2 in ali je glasnost zvoka na 75%.

sveti zeleno, preverite, ali je uDirect 2 vklopljen, ali sta oba vtiča ovratne vrvice pravilno vtaknjena in ali sta napravi povezani.

utripa modro, naprava deluje v načinu premora. Pritisnite gumb za dostop (A) na sprejemno-oddajni napravi uDirect 2, da nadaljujete prenos zvoka.

7. korak: Uravnavanje glasnosti TV-signala

Najprej nastavite glasnost televizijskih zvočnikov tako, da bo ustrezala drugim gledalcem.


Če je uTV 2 priključen na televizijski sprejemnik s kablom RCA/činč (i) ali adapterjem z vtičcem SCART (k), nastavite glasnost z gumboma za uravnavanje glasnosti (b) in (c) na oddajniku uTV 2 (slika 5) na ustrezno raven.

Za vsakodnevno uporabo in podrobnejšo nastavitev zvoka uporabite gumba za uravnavanje glasnosti (+/−) na sprejemno-oddajni napravi uDirect 2 (slika 6).

Če je uTV 2 priključen na televizijski sprejemnik prek priključka za slušalke, lahko glasnost uravnate tudi z daljinskim upravljalnikom za televizijski sprejemnik. Za več informacij o uravnavanju glasnosti televizijskega zvoka glejte navodila za uporabo televizijskega sprejemnika.



Če je televizijski sprejemnik priključen na satelitski ali digitalni sprejemnik, preverite, ali je glasnost na teh napravah nastavljena na 75% za najboljšo kakovost zvoka.

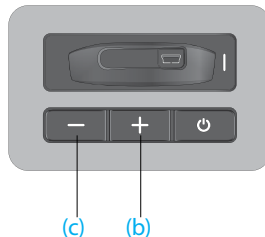


Slika 5



Slika 6

8. korak: Začasna prekinitiv in telefonski klici med delovanjem

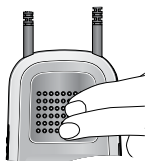

Če želite začasno prekiniti prenos zvoka iz svojega televizijskega sprejemnika, pritisnite gumb za dostop (A) na sprejemno-oddajni napravi uDirect 2.


Med začasno prekinitvijo:

Lučki za Bluetooth bosta na obeh napravah utripali modro.

Vaš slušni aparat bo preklopil na zadnji slušni program.

Če želite še naprej poslušati televizijski sprejemnik, znova pritisnite gumb za dostop (A) na sprejemno-oddajni napravi uDirect 2. Če želite upravljati več vhodnih zvočnih virov, glejte navodila za uporabo sprejemno-oddajne naprave uDirect 2.

Če je uDirect 2 povezan z vašim prenosnim telefonom, lahko še vedno sprejemate telefonske klice, tudi če prek oddajnika uTV 2 gledate televizijski spored. Ob dohodnem klicu uDirect 2 samodejno preneha prenašati zvočni signal iz televizijskega sprejemnika in vašemu slušnemu aparatu pošlje signal iz vašega prenosnega telefona.

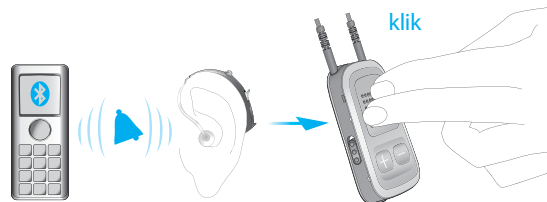

Ko zaslišite zvonjenje, za sprejem telefonskega klica na kratko pritisnite gumb za dostop (A) na sprejemno-oddajni napravi uDirect 2. Za prekinitiv telefonskega klica pritisnite gumb za dostop še enkrat.

Če želite zavrniti klic, med zvonjenjem pritisnite in dve sekundi držite gumb za dostop (A) na sprejemno-oddajni napravi uDirect 2.




Glejte navodila za uporabo sprejemno-oddajne naprave uDirect 2 za povezovanje naprave uDirect 2 s prenosnim telefonom ali drugimi razvedrilnimi oziroma komunikacijskimi napravami, kot so radijski sprejemniki in osebni računalniki.

9. korak: Izklop naprav uTV 2 in uDirect 2


Za izklop naprav:

Za prekinitev prenosa televizijskega zvočnega signala izklopite uTV 2 tako, da pritisnete na gumb za VKLOP/IZKLOP (a), kot je prikazano na sliki 7.

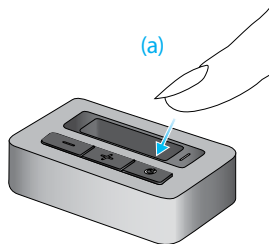

Slika 7

Če sprejemno-oddajne naprave uDirect 2 ne uporabljate za druge namene, npr. za telefonske klice, jo izklopite tako, da napajalno stikalo premaknete v položaj za izklop, kot je prikazano na sliki 8. Napajalna lučka na napravi uDirect 2 bo najprej utripala rdeče, nato pa bo svetila 2 sekundi, kar kaže na popoln izklop.

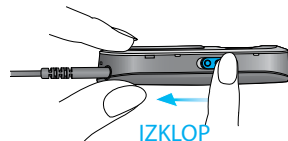


Slika 8



Če ni vhodnega zvočnega signala, bo uTV 2 po 5 minutah samodejno prekinil prenos zvoka s tehnologijo Bluetooth sprejemno-oddajni napravi uDirect 2. Lučka, ki kaže stanje naprave, bo začela utripati zeleno.

10. korak: Napajanje sprejemno-oddajne naprave uDirect 2

Napravo uDirect 2 nežno priklopite na polnilno režo (f) na oddajniku uTV 2, kot je prikazano na sliki 9.

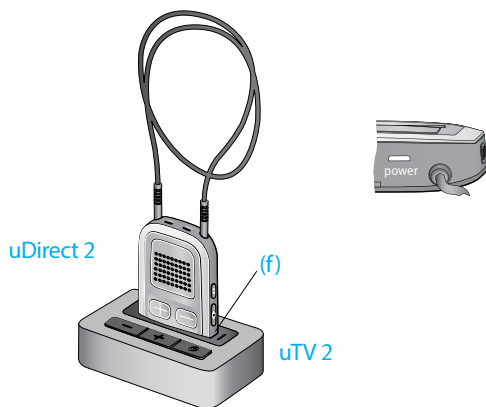

Slika 9

Napajalna lučka na napravi uDirect 2

Polnjenje – neprekinjena rdeča

Napolnjena oziroma polna baterija – neprekinjena zelena

Oddajnik uTV 2 je lahko med polnjenjem vklopljen ali izklopljen. Lučka, ki kaže njegovo stanje, ni povezana s polnjenjem.

Sprejemno-oddajna naprava uDirect 2 se običajno napolni v 90 minutah.

Priporočamo, da napravo uDirect 2 med polnjenjem izklopite.



Ob prvem polnjenju naprave uDirect 2 jo pustite, naj se polni vsaj tri ure, tudi če lučka za baterijo že prej zasveti zeleno. Po prvem polnjenju lahko uDirect 2 neomejeno dolgo pustite priklopljenega na polnilno režo za uDirect 2.

⚠ Zaradi varnostnih razlogov polnite baterijo le s polnilniki, ki jih dobavi Unitron. Če že uporabljate druge polnilnike, morajo biti ti certificirani za standard USB (5,0 VDC/500 mA).

Lučki, ki kažeta stanje naprav uDirect 2 in uTV 2, med prenosom zvoka

	 uDirect 2	 uTV 2
Prenos zvoka	neprekinjena modra 	neprekinjena modra 
Začasno prekinjen prenos zvoka*	kratko utripanje 	utripanje 
uTV 2 ni povezan*	temna	zelena

*Če je uDirect 2 povezan tudi s telefonom, bo njegova lučka za zvočni signal:

- • • med začasno prekinjenim prenosom zvoka utripala dvojno
- • • utripala, če uTV 2 ni povezan


Preverjanje prenosa zvoka

Oddajnik uTV 2 lahko za namene preverjanja delovanja sistema ustvari preizkusni zvok.

Za začetek preizkusa:

Vklopite in pravilno namestite uDirect 2.

Najprej izklopite uTV 2, nato pa na napravi uTV 2 sočasno pritisnite gumba za glasnost () in vklop/izklop (), da lučka, ki kaže stanje naprave, začne utripati v različnih barvah.

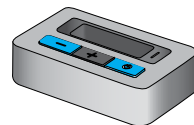

Napravi uDirect 2 in uTV 2 bi se morali zdaj povezati (utripa modra/zelena ali modra/oranžna), vi pa bi morali zaslišati preizkusno melodijo.

Preizkusni zvok traja 2 minuti ali dokler ne pritisnete katerega koli gumba na oddajniku uTV 2.

Na sprejemno-oddajni napravi uDirect 2 lahko z gumboma za uravnavanje glasnosti ( / ) spremenite glasnost preizkusnega zvoka.

Če ne slišite preizkusnega zvoka, ponovite postopek povezovanja, kot je opisan v 4. koraku.

Lučka, ki kaže stanje oddajnika uTV 2, zagotavlja med preizkušanjem različne informacije.

Spreminjanje barv kaže na stanje vhodnega zvočnega signala in povezanost s sprejemno-oddajno napravo uDirect 2.

Primer:

Rdeča/modra/rdeča/modra/itd.: poteka prenos preizkusnega zvoka do naprave uDirect 2, naprava uTV 2 ne zaznava nobenega vhodnega zvočnega signala.

Barvne oznake:

Rdeča: uTV 2 ne zaznava nobenega vhodnega zvočnega signala

Zelena: uTV 2 zaznava vhodni zvočni signal

Oranžna: iskanje naprave uDirect 2

Modra: poteka prenos preizkusnega zvoka do naprave uDirect 2



Če naprava uDirect 2 ni dostopna in če uTV 2 ne zaznava nobenega vhodnega zvočnega signala, bo prekinil preizkus, lučka na njem pa bo začela utripati zeleno.

Vodnik za odpravljanje težav

Najverjetnejši vzrok	Rešitev
Nobena lučka ne sveti neprekinjeno modro	
Naprave niso vklopljene	Vklopite naprave
Napravi uDirect 2 in uTV 2 nista povezani	Ponovite 4. korak
Lučka na oddajniku uTV 2 hitro utripa modro	
uTV 2 deluje v načinu povezovanja prek tehnologije Bluetooth	Pojdite na 4. korak
Le ena od modrih lučk sveti modro	
Ena naprava je povezana z drugo napravo, ki uporablja tehnologijo Bluetooth	Izklopite vse naprave, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth, razen naprav uDirect 2 in uTV 2
Obe lučki svetita modro, vendar ne slišim televizijskega sprejemnika	
Naprava uDirect 2 je zunaj območja delovanja slušnega aparata	Namestite napravo uDirect 2 okoli vratu in pravilno priključite ovratno vrvico. Vse naprave izklopite in znova vklopite
Naprava uDirect 2 ni ustrezno programirana za vaš slušni aparat	Zaprosite slušnega akustika, da znova nastavi uDirect 2 in slušni aparat

Najverjetnejši vzrok	Rešitev
Ne slišim zvoka, ki prek naprave uDirect 2 prihaja iz televizijskega sprejemnika	
Naprave niso vklopljene	Vklopite vse naprave
Kabli niso pravilno vtaknjeni	Ponovite 2. korak
Oddajnik uTV 2 ne zaznava nobenega vhodnega zvočnega signala, lučka utripa zeleno	Poskrbite, da bo zvok na televizijskem sprejemniku vklopljen Glasnost zvoka na televizijskem sprejemniku nastavite na 75% Preverite, ali je zvočni kabel vtaknjen v izhodni priključek
Oddajnik uTV 2 deluje v načinu premora	To kažeta lučki na obeh napravah, ki utripata modro. Na napravi uDirect 2 na kratko pritisnite gumb za dostop (A), da prekinete premor
Razdalja med napravama uDirect 2 in uTV 2 je prevelika	Približajte napravi, med njima je lahko največ 30 m Za odpravo prekinitev med prenosom zvoka preverite, ali je uDirect 2 pravilno nameščen, in poskrbite, da bo uTV 2 v območju delovanja

Najverjetnejši vzrok	Rešitev
Glasnost med prenosom zvoka ni ustrezna (prenizka ali previsoka)	
Viri televizijskega zvoka imajo različno izhodno glasnost	Če je uTV 2 priključen na televizijski sprejemnik prek priključka RCA/činč ali SCART, nastavite glasnost z gumboma za uravnavanje glasnosti na oddajniku uTV 2 Če je uTV 2 priključen na televizijski sprejemnik prek izhodnega priključka za slušalke, lahko glasnost nastavite tudi z daljinskim upravljalnikom za televizijski sprejemnik Nastavite glasnost na vašem satelitskem ali digitalnem sprejemniku Nastavite glasnost z gumboma za uravnavanje glasnosti na napravi uDirect 2
Po priklopu oddajnika uTV 2 se zvočnik televizijskega sprejemnika izklopi	
Za priklop ste izbrali izhodni priključek na televizijskem sprejemniku za slušalke	Izberite drug priključek za izhodni zvočni signal na televizijskem sprejemniku, kot je RCA/činč ali SCART

Pomembne informacije

Skrbno preberite ustrezni oddelek v navodilih za uporabo sprejemno-oddajne naprave uDirect 2, ki ste ga prejeli z napravo uDirect 2.

Opozorila glede nevarnosti

-  Hranite napravo zunaj dosega otrok, mlajših od 3 let.
-  Vpliv na delovanje medicinskih pripomočkov. Ta Unitronova naprava oddaja ob nizkem napajanju digitalno šifrirane signale, s katerimi se sporazumeva z vašim slušnim aparatom. Čeprav je to malo verjetno, lahko ob tem vpliva na medicinske pripomočke, kot je srčni spodbujevalnik. Osebe, ki uporabljajo medicinske pripomočke, kot je srčni spodbujevalnik, ne smejo uporabljati te naprave.
-  Uporabljajte le slušne aparate, ki jih je slušni akustik posebej programiral za vas.
-  Spremembe ali prilagoditve katere koli naprave brez izrecnega Unitronovega soglasja niso dovoljene.

-  Zunanje naprave se lahko priključijo le, če so bile preizkušene skladno z ustreznimi standardi IECXXXX. Uporabljajte le dodatno opremo, ki jo je odobril Unitron.

Informacije o varnosti izdelka

-  Izklopite oddajnik uTV 2, kadar ga ne uporabljate.
-  Med prenosom signalov do svojega slušnega aparata vedno nosite uDirect 2 okoli vratu in poskrbite, da bosta vtiča na ovratni vrviči pravilno vtaknjena.
-  Priključke, vtiče in polnilno rezo na napravi ter napajalnik varujte pred umazanijo.
-  Vse naprave varujte pred preveliko vlago (prostor za umivanje ali kopanje) in toplotnimi viri (grelna telesa, digitalni sprejemniki). Varujte naprave pred prevelikimi sunki ali tresljaji.
-  Čistite naprave z vlažno krpo. Za čiščenje nikoli ne uporabljajte gospodinjskih čistil (čistilnega praška, mila itd.) ali alkohola. Nikoli ne uporabljajte mikrovalovne pečice ali druge grelne naprave za sušenje te naprave.

-  Tehnologija za digitalno šifriran induktiven prenos signalov, ki se uporablja v tej napravi, je izjemno zanesljiva in skoraj neobčutljiva za vplive drugih naprav. Kljub temu se je treba zavedati, da bo v bližini računalniške opreme, večjih elektronskih instalacij ali drugih močnih elektromagnetnih polj morda treba poskrbeti, da bo sistem vsaj 60 cm stran od vplivne naprave, da se zagotovi njegovo pravilno delovanje.
-  Rentgensko sevanje, računalniškotomografsko slikanje ali magnetnoresonančno slikanje lahko uniči ali škodljivo vpliva na pravilno delovanje te naprave.
-  Ne uporabljajte te naprave na območjih, kjer je uporaba elektronske opreme prepovedana.

Informacije o skladnosti

Izjava o skladnosti

Unitron izjavlja, da je ta Unitronov izdelek skladen z bistvenimi zahtevami Direktive 1999/5/ES o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi. Celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo pri proizvajalcu ali lokalnem Unitronovem zastopniku, čigar naslov lahko najdete na seznamu na spletni strani www.unitron.com (lokacije po vsem svetu).

Opomba št. 1:

Ta pripomoček je skladen s 15. delom Pravilnika Zvezne komisije za komunikacije in specifikacijo RSS-210 kanadskega Ministrstva za industrijo. Za delovanje veljata dva pogoja:

- 1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in
- 2) naprava mora sprejeti vsako prejeta interferenco, vključno z interferenco, ki lahko povzroči neželeno delovanje.

Opomba št. 2:

Zaradi sprememb oziroma prilagoditev te naprave, opravljenih brez izrecnega Unitronovega soglasja, lahko dovoljenje Zvezne komisije za komunikacije za uporabo te naprave postane neveljavno.

Opomba št. 3:

Pri preizkušanju te naprave je bilo ugotovljeno, da je naprava skladno s 15. delom Pravilnika Zvezne komisije za komunikacije in standardom ICES-003 kanadskega Ministrstva za industrijo znotraj mejnih vrednosti, ki veljajo za digitalne naprave razreda B.

Navedene mejne vrednosti so določene tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivo interferenco v stanovanjskih prostorih. Ta naprava ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo. Če se ne namesti in ne uporablja skladno z navodili, lahko škodljivo vpliva na radijske komunikacije. Kljub temu ni zagotovila, da pri pravilni namestitvi ne bo prišlo do interference. Če ta naprava škodljivo vpliva na sprejem radijskega ali televizijskega sprejemnika, kar se lahko ugotovi z vklopom in izklopom opreme, lahko uporabnik poskuša odpraviti tovrstno interferenco tako, da:

- Preusmeri ali prestavi sprejemno anteno.

- Poveča razdaljo med opremo in sprejemnikom. Priključi napravo na tokokrog, na katerega zadevni sprejemnik ni priključen.

- Se za pomoč obrne na prodajalca ali izkušenega serviserja radijskih/televizijskih sprejemnikov.

Opomba št. 4:

Izjava o izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju skladno z zahtevami ameriške Zvezne komisije za komunikacije in kanadskega Ministrstva za industrijo

Ta oprema je skladna z zahtevami ameriške Zvezne komisije za komunikacije in kanadskega Ministrstva za industrijo glede izpostavljenosti sevanju v nekontroliranem okolju. Končni uporabniki morajo upoštevati ustrezna navodila za uporabo, da zagotovijo skladnost z zahtevami glede izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju. Ta oddajnik ne sme biti postavljen oziroma ne sme delovati skupaj z nobeno drugo anteno ali oddajnikom.

Več informacij najdete v podatkovnem listu, ki ga lahko prenesete s spletišča www.unitron.com.

Avstralija: Koda dobavitelja  N15398

Nova Zelandija: Dobaviteljeva kodna oznaka Z1285

Informacije o simbolih in njihova razlaga



0678

Z znakom CE Unitron potrjuje, da je njegov izdelek skladen z zahtevami Direktive 1999/5/ES o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi ter medsebojnem priznavanju skladnosti te opreme. Številke, ki sledijo znaku CE, so številke certifikacijskih organov, na katere se je Unitron obrnil skladno z zgoraj navedeno direktivo. Opozorilni znak pomeni, da v eni ali več državah članicah EU veljajo morebitne omejitve uporabe naprave.

Ta naprava spada v 2. razred naprav in se lahko v državah članicah EU uporablja brez omejitev glede uporabe v zaprtih prostorih, v Franciji pa se ne sme uporabljati na prostem.



Ta simbol sporoča, da je pomembno, da uporabnik prebere in upošteva informacije, vsebovane v teh navodilih za uporabo.



Ta simbol sporoča, da je pomembno, da uporabnik upošteva opozorila, vsebovana v teh navodilih za uporabo.



Pomembne informacije o ravnanju z izdelkom in njegovi varnosti.



Avstralska skladnostna oznaka v zvezi z elektromagnetno združljivostjo in radijskimi komunikacijami.



Ta simbol sporoča, da je izdelek, opisan v teh navodilih za uporabo, skladen z zahtevami standarda EN 60601-1 za uporabni del vrste B. Površina slušnega aparata je določena kot uporabni del vrste B.



Ta simbol mora spremljati ime in naslov pooblaščenega zastopnika v Evropski skupnosti.



Ta simbol mora spremljati ime in naslov proizvajalca (ki daje te naprave na trg).

Delovanje

Ta pripomoček je izdelan tako, da deluje brez težav in omejitev, če se uporablja na predviden način, razen če v teh navodilih za uporabo ni navedeno drugače.

Od 0 do 55 °C in relativna vlaga < 95 % (brez kondenzacije).

Prevoz in skladiščenje

Temperatura med skladiščenjem ali prevozom ne sme dlje časa presegati mejnih vrednosti -20/60 °C in relativne vlage 90 %. Zračni tlak naj bo med 500 in 1100 hPa.



Simbol s prečrtanim smetnjakom opozarja, da tega pripomočka ne smete odvreči kot komunalni odpadke.

Stare oziroma nerabljene naprave oddajte centru za obdelavo odpadne elektronske opreme ali pa jih prepustite slušnemu akustiku, ki jih bo oddal naprej. Pravilna odstranitev varuje okolje in zdravje.



Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so znamke družbe Bluetooth SIG, Inc., Unitron pa ima za vsako uporabo teh znamk dovoljenje. Druge znamke in trgovska imena so last ustreznih oseb.

**Unitron Hearing**

20 Beasley Drive, P.O. Box 9017,
Kitchener, ON N2G 4X1 Canada

**Unitron Hearing GmbH**

Max-Eyth-Straße 20, 70736
Fellbach-Oeffingen, Germany

Seznam družb iz skupine
Unitron najdete na spletišču
www.unitron.com

C E 0678 !

Distributer

www.unitron.com

14-031 029-5894-14



unitronTM