

GEEMARC

CLEAR SOUND™

HEAR THE DIFFERENCE

CL2L

**Posebno ojačan, utripajoč,
telefonski in hišni zvonec**



Slovenščina

AUDIO BM

geemarc™
Telecom SA




OPOMBA:

Stikalo za izbiro ALARMA nikoli ne nastavljajte med zvonjenjem/utripanje. Vedno ga nastavite, ko je zvonec CL2 v tihem načinu.

(pri dohodnih klicih ni zvonjenja)


1. OPIS

Zvonec CL2 lahko uporabljate z vratnim zvoncem in telefonom. Glasnost in ton zvonjenja sta nastavljiva tako za hišni zvonec kot za telefon.

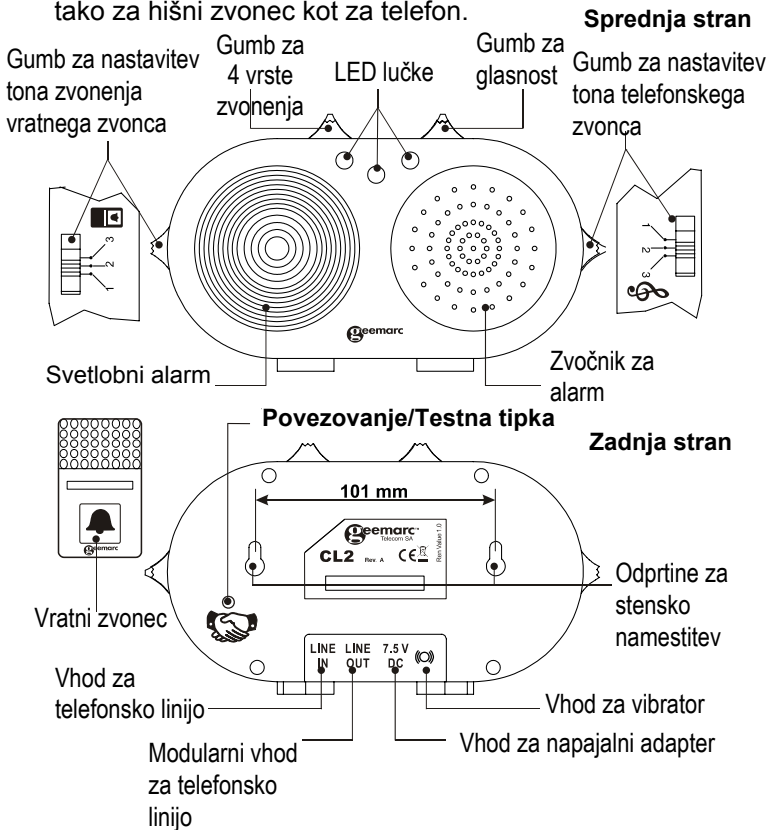

NAMESTITEV

2. NAMESTITEV

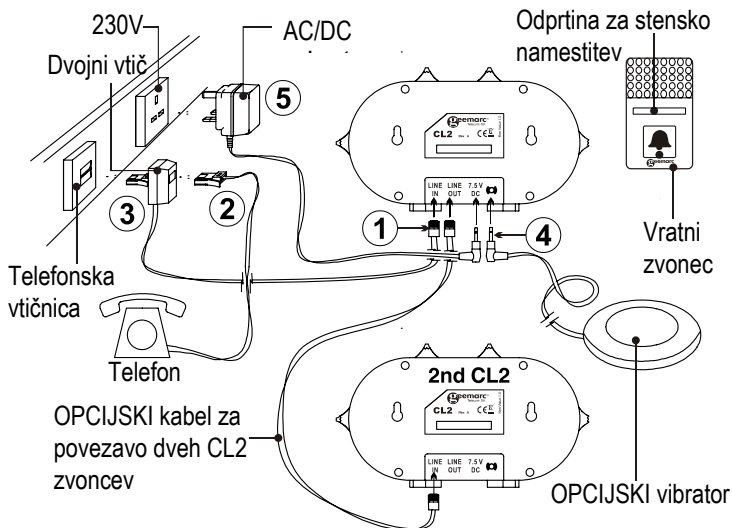


- 1 - Telefonski kabel vklopite v "Line IN" vhod na zvoncu CL2.
- 2 - Vaš telefon vklopite v stensko telefonsko vtičnico.
- 3 - V primeru, da imate opsijski vibrator ga priklopite v vhod za vibrator
- 4 - Napajalni adapter povežite z zvoncem CL2 prek 12V DC vtičnice.
- 6 - Napajalni adapter vklopite v stensko 230V vičnico.

3. Menjava baterij


Hišni zvonec potrebuje 23A 12V baterijo. Baterija je priložena in je od prvi uporabi zvonca ni potrebno menjati.

Za menjavo baterij odprite baterijska vratca in zvonec odstranite s stene. Odvijte tri vijake in zvonec odprite. Zamenjajte baterije in zvonec ponovno namestite na steno.

Zadnja stran zvonca

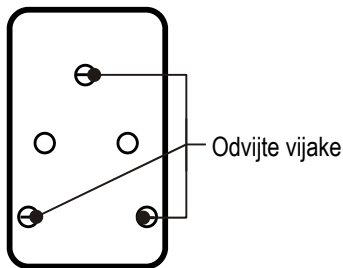

Notranjost zvonca

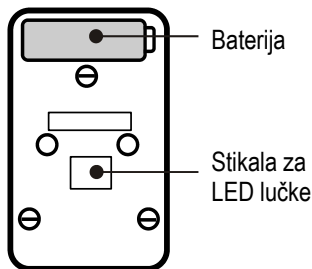

Opomba: Ne uporabljajte baterij za polnjenje.

4. CL2 NASTAVITVE

NASTAVITVE ALARMA

Za dohodne klice – izberite željeno vrsto alarma s pomikanjem stikala za alarm v naslednje položaje:

0 Alarm ni vklopljen

 Hišni/telefonski zvonec in utripajoča lučka

 Hišni zvonec, utripajoča lučka in vibrator (če je ta priključen)

 Hišni/telefonski zvonec in vibrator (če je ta priključen)




Utripanje:

Hišni zvonec – 3 do 4 utripi

Telefon – utripa dokler zvoni telefon

NASTAVIEV GLASNOSTI

Za nastavev glasnosti zvonca CL2 uporabite drsnik za glasnost.

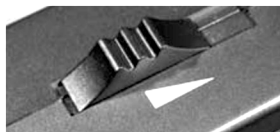

NASTAVITEV TONA ZVONENJA TELEFONA

S stikalom lahko spreminjate ton zvonjenja CL2 zvonca pri dohodnih telefonskih klicih.

NASTAVITEV TONA VRATNEGA ZVONCA

S stikalom lahko spreminjate ton zvonjenja CL2 vratnega zvonca.



OPCIJSKI DODATKI:

Dodaten hišni zvonec – za namestitev pred več vrat vašega doma.

Vibrator – Geemarc vibrator (CLA2) lahko postavite pod blazino ali stol. Ta bo zavibriral, ko bo zvonil hišni zvonec ali telefon. To je še posebej koristno za uporabnike slušnih aparatov, ki ponoči ne nosijo slušnih aparatov.

Ročna ura z alarmom – lahko jo nosi nekdo, ki leži v postelji in s pomočjo ročne ure pokliče pomoč.

ODPRAVLJANJE NAPAK

5. ODPRAVLJANJE NAPAK

V primeru, da zvonec CL2 ne deluje pravilno, ga preverite na naslednje načine:

- **Telefon zvoni, zvonec CL2 ne zvoni:**

Preverite povezavo med telefonski vtičnico in zvoncem CL2.

- **Hišni zvonec ne zvoni:**

1. Preverite, da je zvonec CL2 vklopljen v električno omrežje in da je pravilno vklopljen.
2. Odprite hišni zvonec in preverite, če so baterije polne in pravilno vstajene.
3. Poiskusite zamenjati baterije.
4. Preverite ali je hišni zvonec pravilno povezan z glavnim zvoncem CL2.

Dobavitelj za Slovenijo:



Info telefon: 059 044 055

E-mail: info@audiobm.si

Spletna stran: www.audiobm.si

