

Unitron

uMic™

navodila za uporabo



Hvala

Hvala ker ste izbrali Unitron uMic™.

Pri Unitron si prizadevamo lajšati težave ljudi, ki trpijo zaradi slušne prizadetosti. Skupaj z slušnimi akustiki iščemo napredne rešitve po meri za vsakogar. Ker je sluh pomemben.

Vaš uMic

Slušni akustik: _____

Telefon: _____


Serijska številka: _____

Garancija: _____


Datum nakupa: _____

Hitri referenčni vodnik


Polnjenje uMic

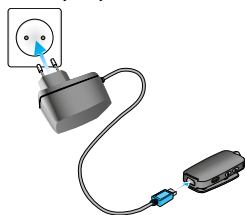


Vklop/Izklop

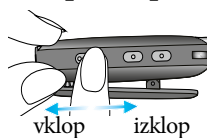

Nošenje uMic

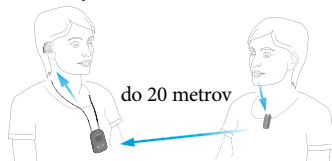

Bluetooth povezovanje

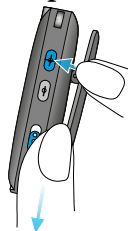

Indikator




Vklop ON		Zeleno 2 sekundi
Izklop OFF		Rdeče 2 sekundi
Polnjenje		Polno rdeče
Opozorilo za prazno baterijo		Dodaten kratek rdeč utrip poleg glavne lučke
Oddajanje		Polno modro
Premor oddajanja		Kratek moder utrip
Način za povezovanje		Hitro modro utripanje

Kazalo

Pregled vašega uMic	2
Prva uporaba	4
Polnjenje uMic	5
Vklapljanje/Izklapljanje uMic	7
Posebni načini uporabe	8


Pregled vašega uMic

- 1 Glasnost zavor (⊕)
- 2 Glasnost navzdol (⊖)
- 3 Stikalo za vklop (I/O)
- 4 Vhod za polnjenje (mini-USB)
- 5 Odprtina za mikrofonski
- 6 Indikacijska lučka
- 7 Luknja za vrvico
- 8 Sponka za pritrditev

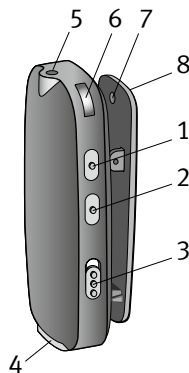

Dodatki

- (Vsebina je lahko različna glede na državo)
- Dvojni mini-USB razdelilnik (1 vhod/ 2 izhod)
- Vrvica za okoli vratu
- Zaščitna torbica

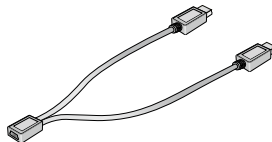

Ostali možni dodatki

Unitron mini-USB 12V polnilni adapter za polnjenje v avtomobilu.




Poleg vašega Unitron slušnega aparata z možnostjo brezžičnega delovanja potrebujete tudi kompatibilno rešitev oddajanja signala. V teh navodilih za uporabo je predstavljen primer uporabe uDirect™ 2. Ker oddajnik uMic temelji na tehnologiji Bluetooth® so z njim lahko kompatibilni tudi drugi Bluetooth sprejemniki, vendar je uMic optimiziran in testiran samo z Unitron uDirect 2 sprejemnikom.

Prva uporaba

Sistem je sestavljen iz treh glavnih elementov:

- uMic
- Unitron slušni aparati
- Unitron uDirect 2

uMic brezžično oddaja glas govorca v vaše slušne aparate prek uDirect 2 sprejemnika. Glasnost mikrofona slušni aparatov bo samodejno prilagojena med sprejemanjem signala iz uMic. Nivo prilagajanja vam bo nastavil vaš slušni akustik.

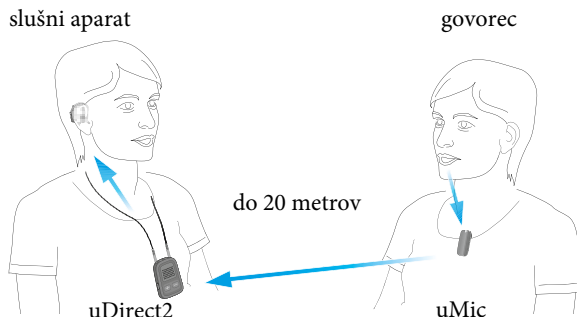


Polnjenje uMic

Vaš uMic ima vgrajeno baterijo za polnjenje, ki je ne morete odstraniti. V primeru prazne baterije bo indikacijska lučka utripala rdeče.

Polnjenje:

1. Vstavite Unitron napajalni adapter, ki je bil priložen z uDirect 2 v uMic mini-USB vtičnico.

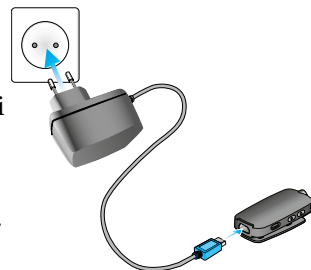

2. Vklomite napajalni adapter v električno vtičnico. Povprečen čas polnjenja je 2 uri. Polnjenje je končano, ko indikacijska lučka sveti polno zeleno.


 Pri prvem polnjenju uMic pustite, da se ta polni najmanj tri ure, tudi če indikator za baterijo ne sveti ali sveti polno zeleno že prej.

Uporaba napajalnega adapterja na dveh napravah:

Na napajalni adapter nastavite mini-USB razdelilnik in ga vklopite v napravi, kot je prikazano na sliki spodaj.


Z uDirect 2:

Hkrati lahko polnite obe napravi.

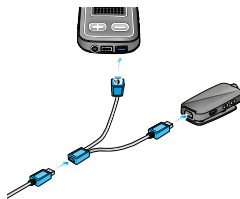

Z uTV 2:

UMic lahko polnite, uTV™ 2 pa uporabljate.

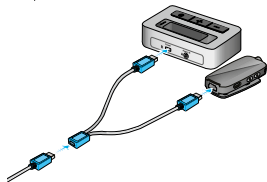


 Popolnoma varno je, da pustite uMic polniti čez noč.

Vklapljanje/izklapljanje uMic

Potisnite stikalno za vklop () kot je prikazano, da vklopite ali izklopite uMic.

Potisnite stikalo za vklop v smeri vhoda za polnjenje za vklop uMic.

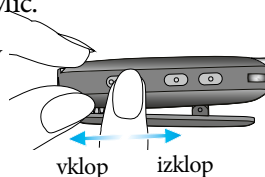

Varčevalni način

V primeru, da po 30 minutah sprejemnik, kot je uDirect 2, ni zaznan, se bo uMic samodejno izklopil, da bi varčeval z baterijo, tudi če je stikalo za vklop na položaju za vklop.


Za izhod iz varčevalnega načina uMic izklopite in ga ponovno vklopite.

Posebni načini uporabe

uMic in telefoniranje

Telefonski klici imajo v uMic vedno prednost.

V primeru, da je uDirect 2 povezan z vašim telefonom, lahko še vedno sprejemate telefonske klice, tudi če uporabljate uMic. V primeru dohodnega klica bo uDirect 2 samodejno ustavil sprejemanje avdio signala iz uMic in namesto tega poslal avdio signal iz vašega telefona v vaše slušne aparate.

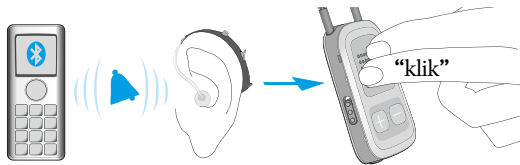

Za sprejem dohodnega klica pritisnite dostopno tipko na uDirect2(A), ko bo ste slišali melodijo zvonjenja vašega telefona. Za prekinitev klica ponovno pritisnite tipko na uDirect 2.

uMic in televizija

Za doseganje visoke kakovosti zvoka v stereo načinu, za gledanje televizije priporočamo uporabo namenskega uTV 2.

Pri televizijah kjer analogni avdio izhod ni prisoten, ali ko potujete, lahko za izboljšanje kvalitete zvoka med gledanjem televizije uporabite uMic.



Za najboljši rezultat:

1. Poiščite kje se nahaja zvočnik televizije.
2. Postavite uMic 20cm od zvočnika.
3. Med gledanjem televizije pustite uMic vklopljen v napajalni adapter.





Unitron Hearing Ltd.

20 Beasley Drive, P.O. Box 9017,
Kitchener, ON N2G 4X1 Canada

European Representative

Max-Eyth-Straße 20, 70736
Fellbach-Oeffingen, Germany

For a listing of Unitron group
companies, please visit
www.unitron.com



Distributor

www.unitron.com



12-021 029-5905-02

