

Navodila za uporabo pripomočka uStream



unitron. Hearing matters

Hvala

Hvala, ker ste izbrali pripomoček Unitron uStream.

V podjetju Unitron si močno prizadevamo premagovati težave naglušnih ljudi. Tesno sodelujemo s slušnimi akustiki in izdelujemo napredne rešitve, ki so dostopne vsem. Ker je sluh pomemben.

Predvidena uporaba pripomočka uStream je prejemanje signalov iz različnih naprav Bluetooth® in njihovo brezžično pošiljanje v vaš slušni aparat.

Podprte so skoraj vse zvočne naprave Bluetooth, kot so mobilni telefoni ali MP3-predvajalniki. Uživate v govoru in glasbi iz drugih večpredstavnostnih naprav, kot so računalniki, televizorji ali glasbeni predvajalniki.

Pripomoček uStream lahko uporabljate tudi kot daljinski upravljalnik, s katerim lahko svoj slušni aparat prilagodite različnim okoliščinam poslušanja.

 **Opomba:** Preden lahko pripomoček uStream uporabite kot daljinski upravljalnik za slušni aparat, ga mora vaš slušni akustik konfigurirati.

Vaš pripomoček uStream

Slušni akustik: _____

Telefon: _____

Serijska številka pripomočka uStream: _____

Garancija: _____


Datum nakupa: _____

Aplikacijo uControl™ lahko prenesete iz trgovin App Store in Google play. Poiščite Unitron in izberite uControl.




Hitri referenčni vodnik


Polnjenje pripomočka uStream

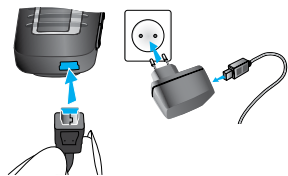


Nošenje pripomočka uStream

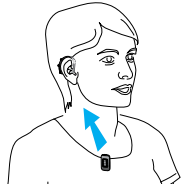

Vzpostavlanje povezave Bluetooth

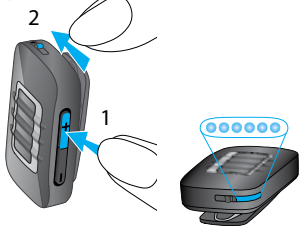

Vklop/izklop

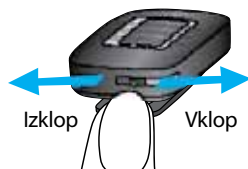

Signalna lučka

Sveti rdeče – polnjenje
Sveti zeleno – napolnjeno
Utripa rdeče – skoraj prazna baterija
Brez lučke – prazna baterija
Sveti rožnato – predstaviteni zvok
Sveti modro – predvajanje
Kratko modro utripanje – povezana je 1 naprava
Dvojno modro utripanje – povezani sta 2 napravi
Hitro modro utripanje – vzpostavlanje povezave

Kazalo

Hitri pregled pripomočka uStream	2
Nastavitev napajanja	4
Polnjenje pripomočka uStream	5
Vklop in izklop pripomočka uStream	6
Povzetek signalnih lučk.....	7
Pravilno nošenje pripomočka uStream	9
Delovna razdalja.....	9
Funkcija zaklepanja gumbov	10
Preizkušanje zvoka prek pripomočka uStream.....	11
Funkcije gumba za dostop	12
Govorjena obvestila.....	12
Aplikacija uControl.....	13
Uporaba pripomočka uStream kot daljinskega upravljalnika za slušni aparat	14
Uporaba pripomočka uStream z mobilnim telefonom	16
Napredne telefonske možnosti	23
Uporaba pripomočka uStream z zvočno napravo.....	27
Uporaba pripomočka uStream skupaj s pripomočkom uTV 3	30
Uporaba pripomočka uStream s pripomočkom uMic	33
Upravljanje več zvočnih virov, povezanih s pripomočkom uStream	36
Brisanje seznanjenih naprav Bluetooth	38
Vodnik za odpravljanje težav	39
Opozorila	47
Informacije o simbolih in njihova razlaga	53
Informacije o skladnosti.....	55
Povratne informacije uporabnika.....	57
Dodatne opombe.....	58

Hitri pregled pripomočka uStream

Gumbi


- 1 Dostop (A)
- 2 Povečanje/zmanjšanje glasnosti (+/-)
- 3 Stikalo za vklop/izklop (I/O)

Vhodi

- 4 Odprtina za mikrofonski
- 5 Vhod za polnjenje (mini-USB)


Drugo

- 6 Signalna lučka
- 7 Zanka za vrvico
- 8 Zadrževalna sponka

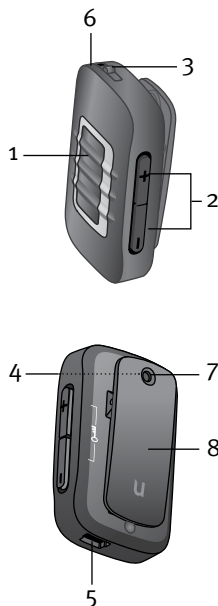

Dodatna oprema


- 9, 10 Univerzalni napajalnik s priključkom mini-USB
- 11-14 Adapterji za ZDA, EU, VB in AUS

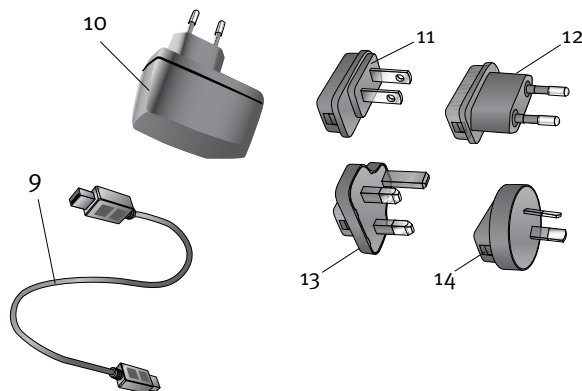

Priloženi adapterji za države se lahko razlikujejo glede na državo.

Nastavitev napajanja

Izberite adapter, ki ustreza vaši državi.

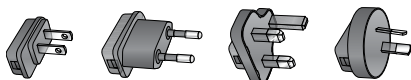


ZDA

EU

VB


AUS

1. Okrogli del adapterja v celoti vstavite v okrogli del univerzalnega napajalnika.
2. Potisnite spodnji del adapterja, da se pravilno namesti. Preverite, ali je adapter pravilno vstavljen.

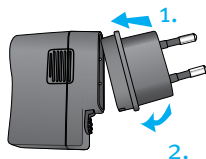

Če želite odstraniti napajalni vmesnik:

1. Povlecite zatič na univerzalnem napajalniku in ga pridržite.
2. Nežno povlecite adapter navzgor, da ga odstranite.

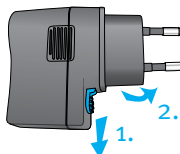


Polnjenje pripomočka uStream

Pripomoček uStream ima neodstranljivo baterijo, ki jo je mogoče polniti.

Če jo želite napolniti:

1. Večji del napajalnega kabla priključite v univerzalni napajalnik. Manjši del priključite v vrata mini-USB na pripomočku uStream.

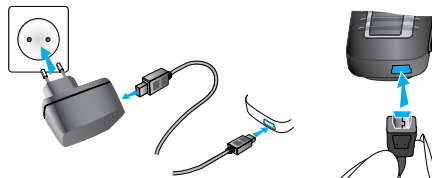

2. Napajalnik priključite v električno vtičnico. Med polnjenjem signalna lučka sveti rdeče, ko pa je baterija napolnjena, lučka postane zelena. Pripomoček uStream lahko brez skrbi ostane priključen čez noč.

 Ob prvem polnjenju naj se pripomoček uStream polni vsaj tri ure.

 Za polnjenje pripomočka uStream lahko uporabite tudi pripomoček uTV™ 3.

Vklop in izklop pripomočka uStream

Pomaknite stikalo za vklop/izklop (I/O), kot je prikazano na sliki, da vklopite oziroma izklopite pripomoček uStream.



Pripomoček uStream izklopite, ko ga ne uporabljate, ko je shranjen ali med prevažanjem.

Če želite pripomoček uStream uporabljati, ga vklopite.

Povzetek signalnih lučk

Signalna lučka zagotavlja naslednje koristne informacije:

Signalna lučka

Polnjenje	Sveti rdeče	
Popolnoma napolnjena baterija	Sveti zeleno	
Vklop	Sveti zeleno dve sekundi	
Izklop	Sveti rdeče dve sekundi	
Baterija nad 10 %, normalno delovanje	Počasno zeleno utripanje	
Baterija pod 10 %, potrebno je polnjenje (vsaj dve uri)	Kratko rdeče utripanje**	
Baterija je prazna, potrebno je polnjenje (vsaj dve uri)	Brez lučke po vklopu	
Stanje zaklepanja omogočeno/ onemogočeno	Kratko utripa rdeča (zaklenjeno) ali kratko utripa zelena (odklenjeno)	

Prenos zvoka preko Bluetooth naprave (glasba ali telefon)	Sveti modro	
Povezana je ena naprava Bluetooth	Kratko modro utripanje	
Povezani sta dve napravi Bluetooth	Dvojno modro utripanje	
Vzpostavljanje povezave Bluetooth	Hitro modro utripanje	
Predvajanje predstavitev zvoka	Sveti rožnato	

Stanje baterije

Barva signalne lučke vas obvešča o stanju baterije pripomočka uStream.

Zelena signalna lučka pomeni, da je stanje baterije nad 10 %.

Rdeča signalna lučka pomeni, da je stanje baterije pod 10 %. Preostalo vam je še manj kot ura in pol pretočnega predvajanja, baterijo pa morate polniti vsaj dve uri.

Pravilno nošenje pripomočka uStream

Pred uporabo telefona, poslušanjem glasbe ali pretočnim predvajanjem iz televizorja vstavite v ušesa vaše slušne aparate in jih vključite.

1. Vključite pripomoček uStream.
2. Varno ga pripnite na svoja oblačila. Za najboljše rezultate naj bo pripomoček uStream oddaljen 20 cm od ust. Razdalja ne sme biti daljša od 40 cm.

 Med telefonskimi klici ne pokrivajte pripomočka uStream z oblačili, da preprečite praskajoče zvoke.

Delovna razdalja

- Optimalna razdalja 20 cm
- Najdaljša razdalja 40 cm

Funkcija zaklepanja gumbov

Gumbe pripomočka uStream lahko zaklenete, da preprečite nenamerno pritiskanje. Hkrati pritisnite in pridržite gumba za povečanje in zmanjšanje glasnosti (+/-), da zaklenete oziroma odklenete gumbe. Signalna lučka bo trikrat utripnila rdeče, kar pomeni, da so gumbi zaklenjeni.

Znova hkrati pritisnite in pridržite gumba za povečanje in zmanjšanje glasnosti (+/-), da gumbe odklenete. Signalna lučka bo trikrat utripnila zeleno, kar pomeni, da so gumbi odklenjeni.

Ko so gumbi zaklenjeni, bo signalna lučka trikrat utripnila, v slušnem aparatu pa boste lahko zaslišali trojni pisk vsakič, ko pritisnete gumb.

Tudi ko so gumbi zaklenjeni, lahko sprejemate dohodne telefonske klice z gumbom za dostop (A).

 V zaklenjenem stanju signalna lučka neha utripati.

 Simbol ključa na hrbtni strani pripomočka uStream vas opominja na funkcijo zaklepanja.

Preizkušanje zvoka prek pripomočka uStream

1. Pravilno namestite pripomoček uStream.
2. Med vklopom naprave pritisnite in pridržite gumb za dostop (A). Sprostite gumb za dostop. Signalna lučka bo svetila rožnato.

Slušni aparat bodo prešli v način pretočnega prenosa in slišali boste predstavitveni zvok pripomočka uStream.

Z gumboma za glasnost (+/-) prilagodite nastavev glasnosti.


Predvajanje predstavitvenega zvoka se ustavi po treh minutah ali ob pritisku gumba za dostop. Stopnja glasnosti, ki jo nastavite med predstavitvenim zvokom, bo uporabljena tudi za govorjena sporočila pripomočka uStream.

Če predstavitvenega zvoka ne slišite, si oglejte navodila za odpravljanje težav.

Funkcije gumba za dostop

Gumb za dostop ima več funkcij:

- **Telefon:** Upravljanje telefonskih funkcij, kot sta sprejemanje in prekinitev telefonskih klicev. Za več informacij si oglejte razdelek »Uporaba pripomočka uStream s pametnim ali prenosnim telefonom«.
- **Pretočni prenos:** Začasna ustavitev in nadaljevanje pretočnega prenašanja iz zvočne naprave.
- **Daljinsko upravljanje:** Funkcijo lahko uporabite za izbiranje programov slušnega aparata.

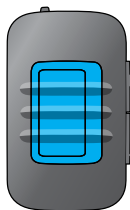

Govorjena obvestila

Govorjena obvestila vas s funkcijo pretvorbe besedila v govor obveščajo o različnih načinih delovanja in stanju pripomočka uStream, denimo pri prazni bateriji.

Vaš slušni akustik lahko konfigurira nastavitev jezika in obvestila, ki bodo govorjena.

 **Identifikacija klicatelja je neodvisna od stopnje govorjenih obvestil.**

 **Govorjena obvestila vam mora omogočiti vaš slušni akustik.**

Aplikacija uControl

uControl je aplikacija za pametni telefon, ki omogoča hitro ter preprosto prilagajanje glasnosti in programov.

Ravno tako omogoča:

- posamično upravljanje glasnosti v levem in desnem slušnem aparatu,
- dodatno upravljanje programov,
- preprosto vzpostavljanje povezave Bluetooth.



Uporaba pripomočka uStream kot daljinskega upravljalnika za slušni aparat

 Preden lahko uporabljate funkcijo daljinskega upravljalnika, mora vaš slušni akustik omogočiti daljinsko upravljanje.

Če pripomoček uStream uporabljate kot ročni daljinski upravljalnik, je lahko od slušnih aparatov oddaljen največ 55 cm. Pripomoček uStream držite, kot je prikazano na sliki.



Spreminjanje glasnosti

Pritisnite gumba za glasnost (+/-) na pripomočku uStream, da prilagodite glasnost slušnega aparata:

- Pritisnite (+) za povečanje glasnosti:
- Pritisnite (-) za zmanjšanje glasnosti:

 Prilagajanje glasnosti s pripomočkom uStream ima enak učinek kot prilagajanje glasnosti slušnega aparata.

Sprememba programa

Z gumbom za dostop (A) lahko v slušnem aparatu spreminjate programe poslušanja.

Spreminjanje programov slušnega aparata je mogoče samo, če ne poteka pretočno prenašanje.

Več informacij o daljinskem upravljanju

- Kot potrditev, da je bila vaša izbira uporabljena, bodo vaši slušni aparati morda zapiskali.
- Oba slušna aparata sta upravljana hkrati.
- Razpoložljive programe slušnih aparatov in stopnje glasnosti nastavi vaš slušni akustik.

Uporaba pripomočka uStream z mobilnim telefonom

Če ima vaš mobilni telefon vmesnik Bluetooth (denimo iPhone ali telefon Android), lahko pripomoček uStream uporabljate za brezžično pretočno prenašanje telefonskih pogovorov v vaše slušne aparate, kar vam omogoča poslušanje klicateljevega glasu neposredno s slušnim aparatom. Pripomoček uStream s svojim mikrofonom zazna vaš glas in ga pretočno prenese v vaš telefon.

Gumb za dostop (A) med telefonskimi klici zagotavlja številne funkcije za pomoč pri upravljanju klicev.



Vzpostavljanje povezave z mobilnim telefonom

1. V meniju z nastavitvami telefona omogočite vmesnik Bluetooth.
2. Če je pripomoček uStream izklopljen, pritisnite in pridržite gumb (+), da pripomoček uStream vklopite. Modra signalna lučka za zvok bo utripala.
3. V telefonu omogočite način povezovanja prek vmesnika Bluetooth, da boste lahko dodali novo napravo. Za podrobnosti si oglejte navodila proizvajalca. Ob pozivu vnesite »0000« kot kodo za seznanitev.
4. Ob pozivu sprejmite zahtevo, da pripomočku uStream omogočite dostop do telefonskega imenika. To se uporablja za funkciji glasovnega klicanja in prepoznavanja ID-ja klicatelja.
5. Ko je povezava uspešno vzpostavljena, modra signalna lučka za zvok na pripomočku uStream neha utripati.

Po prvi uspešni povezavi bi se morala telefon in pripomoček uStream naslednjič povezati samodejno.

-  Če povezave po opisanih korakih ni mogoče vzpostaviti, se obrnite na vašega slušnega akustika.
-  Za sprejemanje telefonskih klicev mora vaš telefon podpirati slušalke Bluetooth (HSP) ali profil »Prostoročno« (HFP). Med vzpostavljanjem povezave s telefonom se lahko pojavi vprašanje, katero storitev Bluetooth želite omogočiti. Izberite »Slušalke« ali »Stereo slušalke« (če je na voljo).
-  Za dostop do funkcij prepoznavanja ID-ja klicatelja mora vaš telefon podpirati profil dostopanja do telefonskega imenika (PBAP).
-  Pri vzpostavljanju povezave s prenosnim telefonom priporočamo, da onemogočite tone telefonskih tipk in opozorila za sporočila SMS.
-  Če želite poslušati stereo glasbo iz telefona, mora ta podpirati profil A2DP/»Stereo slušalke«.

Priprava na telefonske klice

Med telefonskimi klici s pripomočkom uStream mora biti telefon oddaljen 5–10 m, da je zagotovljena zanesljiva povezava, pripomoček uStream pa varno pripet na vaša oblačila največ 40 cm od slušnih aparatov.

Vzpostavljanje telefonskih klicev

S številčnico v telefonu vnesite številko in pritisnite gumb za klicanje, da vzpostavite klic. Morda boste slišali znak centrale, odvisno od telefona.

Govorite v mikrofonsko pripomočko uStream, ne v telefon. V hrupnem okolju boste morda ugotovili, da klicatelj lažje sliši vaš glas, če pripomoček uStream pomaknete bliže ustom.

Z gumboma za glasnost na pripomočku uStream (+) (–) lahko prilagodite glasnost.

Dohodni klici

Pripomoček uStream mora biti vklopljen, povezan s telefonom in pravilno nameščen.

Ko prejmete klic v telefon, bo signalna lučka za zvok pripomočka uStream svetila modro, v slušnem aparatu pa boste slišali ton zvonjenja.

Sprejemanje dohodnih klicev

Za sprejem dohodnega klica kratko pritisnite gumb za dostop (A) na pripomočku uStream, ko v slušnih aparatih zaslišite ton zvonjenja. Ton zvonjenja boste v slušnih aparatih zaslišali po približno petih sekundah.




Med klicem govorite v pripomoček uStream, ne v telefon.

-  Zaradi vaše varnosti bodo mikrofoni slušnega aparata med telefonskimi klici in pretočnim prenašanjem zvoka delovali na nižanih stopnjah.
-  Naenkrat lahko poteka samo en telefonski klic. Če je en klic že vzpostavljen, bo drugo zvonjenje telefona prezrto.

Konec klica

Če želite telefonski klic končati prek pripomočka uStream, kratko pritisnite gumb za dostop (A). Klic bo prekinjen in slušni aparat bo preklopil nazaj v prej aktivni program ali zvočni vir (kot je zvočni priključek).

Namesto s pripomočkom uStream lahko klic končate tudi s telefonom.

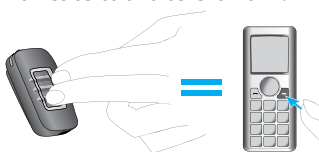

Različni toni zvonjenja pripomočka uStream

Telefonski ton zvonjenja je odvisen od konfiguracije pripomočka uStream in zmogljivosti vašega telefona.

Ton zvonjenja je določen samodejno med začetnim postopkom seznanitve telefona in ga ni mogoče konfigurirati.

Če s pripomočkom seznanite več kot en telefon, bosta imela drugi in tretji seznanjeni telefon

drugačna tona zvonjenja. Skupno trije različni toni zvonjenja so določeni samodejno.

Pripomoček uStream bo tudi najavil ime klicatelja, kot je prikazano na zaslonu telefona (prepoznavanje klicatelja uporablja tehnologijo pretvorbe besedila v govor). Uporabljeno je ime iz telefonskega imenika.

 **Opomba:** Vaš telefon mora podpirati to funkcijo. Za več informacij si oglejte uporabniški priročnik ali se posvetujte z dobaviteljem telefona.

 **Privzeta nastavitve jezika v novem pripomočku uStream je ameriška angleščina.** Vaš slušni akustik lahko konfigurira ustrezni jezik za pravilno izgovarjavo imen. Vaš slušni akustik lahko na vašo zahtevo izklopi funkcijo prepoznavanja klicatelja.

Zavrnitev klica

Če dohodnega klica ne želite sprejeti, pritisnite gumb za dostop (A) na pripomočku uStream in ga držite dve sekundi, da ton zvonjenja preneha. Enak učinek lahko dosežete tudi, če klic zavrnete s telefonom.

Napredne telefonske možnosti

Slušni akustik lahko v pripomočku uStream konfigurira naslednje dodatne funkcije. Določene so za dolgi pritisk (dve sekundi) gumba za dostop (A):

 **Vaš telefon mora podpirati te funkcije.** Za podrobnosti si oglejte uporabniški priročnik vašega telefona.

Vnovično klicanje zadnje številke

Z dolgim pritiskom gumba za dostop (A) boste znova poklicali zadnjo klicano številko.

Glasovno klicanje

Z dolgim pritiskom gumba za dostop (A) boste zagnali glasovno klicanje, ki omogoča, da namesto vnašanja številke izgovorite ime osebe, ki jo želite poklicati.

 **Če uporabljate dva telefona hkrati, lahko za glasovno klicanje uporabljate samo zadnji povezan telefon.**

Klicanje priljubljene številke

Z dolgim pritiskom gumba za dostop (A) boste poklicali vnaprej določeno številko.

Zadržanje klica

Če med telefonskim pogovorom dolgo pritisnete gumb za dostop (A), boste klic postavili na čakanje. Klicatelj ostane na zvezi, vendar se zvok ne prenaša, slušni aparat pa preklopi na prejšnji program poslušanja. Ta način vam omogoča ločeni pogovor z osebo zraven vas, brez da bi oseba na telefonski zvezi slišala vajin pogovor.

Prenos klica

Če med telefonskim pogovorom dolgo pritisnete gumb za dostop (A), boste klic prenesli v telefon. To omogoča predajo telefona drugi osebi. Vaši slušni aparati bodo preklopil nazaj na prejšnji program poslušanja.

Ko je klic na čakanju ali prenesen v telefon, še enkrat dolgo pritisnete gumb za dostop (A), da klic prenesete nazaj v pripomoček uStream in ga nadaljujete prek slušnih aparatov.

 **Dokler je klic na čakanju ali prenesen v telefon, lahko gumb za dostop (A) spet uporabljate za spreminjanje programov slušnih aparatov.**

Prepoznavanje klicatelja, izgovarjava imen klicateljev

Pripomoček uStream vam morda lahko pove ime klicatelja.

Če vaš telefon podpira dostopanje do telefonskega imenika (PBA) ali profil dostopanja do telefonskega imenika (PBAP), bo pripomoček uStream ob vsakem zvonjenju telefona poskušal dostopati do podatkov o klicatelju.

Ko telefon zazvoni, se prikazani podatki prenesejo v pripomoček uStream in so prek slušnih aparatov izgovorjeni v tem vrstnem redu:

- Ime, ki je shranjeno v vašem telefonskem imeniku. V primeru s slike boste slišali »Mike Office«.
- Telefonska številka, če ime klicatelja ni znano.



Vaš slušni akustik lahko konfigurira nastavitve jezika pripomočka uStream in tako zagotovi, da bo izgovarjava pravilna.

Telefonski imenik se ne prenese v pripomoček uStream. Na ta način lahko pripomoček uStream podpira uporabo različnih telefonov.

Če želite preveriti, ali vaš telefon podpira to funkcijo, si oglejte uporabniški priročnik ali se posvetujte s prodajalcem telefona.

 Nekateri modeli slušnih aparatov ne podpirajo funkcije prepoznavanja klicatelja.

 Vaš slušni akustik mora omogočiti funkcijo prepoznavanja klicatelja.

Uporaba pripomočka uStream z zvočno napravo

Pretočni prenos glasbe prek povezave Bluetooth

Če ima vaša naprava za predvajanje zvoka vmesnik Bluetooth (denimo MP3-predvajalnik ali računalnik), lahko pripomoček uStream uporabljate za brezžično pretočno prenašanje zvoka v vaše slušne aparate.

Vzpostavljanje povezave z zvočno napravo

1. Omogočite Bluetooth v napravi/telefonu.
2. Če je pripomoček uStream izklopljen, pritisnite in pridržite gumb (+), da pripomoček uStream vklopite. Modra signalna lučka za zvok bo utripala.
3. V napravi omogočite način povezovanja prek vmesnika Bluetooth, da boste lahko dodali novo napravo. Za podrobnosti si oglejte navodila proizvajalca. Ob pozivu vnesite »0000« kot kodo za seznanitev.
4. Ko je povezava uspešno vzpostavljena, modra signalna lučka za zvok na pripomočku uStream neha utripati.

Predvajanje zvoka iz vaše naprave

1. Začnite predvajanje na vaši napravi.
2. Prilagodite glasnost v napravi na srednjo ali visoko stopnjo.
3. Z gumboma za glasnost na pripomočku uStream (+/–) lahko prilagodite glasnost.

Začasna zaustavitev predvajanja

Če želite začasno ustaviti pretočni prenos in poslušati pogovor, pritisnite gumb (A), da začasno ustavite pretočni prenos. Za nadaljevanje pretočnega prenosa znova pritisnite gumb (A).

Zaustavitev predvajanja

Če želite zaustaviti predvajanje v napravi in preklopiti nazaj na običajne programe poslušanja, pritisnite gumb za dostop (A) in ga držite dve sekundi.

 **Opomba:** Če povezave po opisanih splošnih korakih ni mogoče vzpostaviti, si oglejte uporabniški priročnik ali se obrnite na prodajalca naprave.


 **Opomba:** Zmogljivost pretočnega prenašanja s pripomočkom uStream je štiri ure (če je baterija popolnoma napolnjena).

 **Opomba:** Med pretočnim prenašanjem pripomočka uStream ni mogoče uporabljati kot daljinskega upravljalnika za slušni aparat. Pritisnite gumb za dostop (A) in ga pridržite (dve sekundi), da popolnoma ustavite pretočni prenos prek povezave Bluetooth.

Uporaba pripomočka uStream skupaj s pripomočkom uTV 3

Če imate pripomoček uTV 3, lahko:

- Pretočno prenašate zvok iz do 30 m oddaljenega televizorja v slušne aparate.
- Napolnite pripomoček uStream v nosilcu za polnjenje.

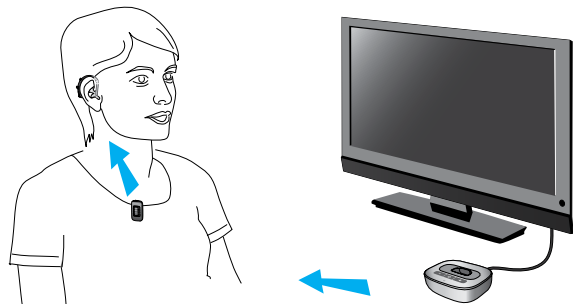

Polnjenje pripomočka uStream v nosilcu za polnjenje

1. Preverite, ali ima pripomoček uTV 3 pravi nosilec za polnjenje pripomočka uStream. Za podrobnosti si oglejte priročnik za uTV 3.

2. Preverite, ali je pripomoček uTV 3 vklopljen, nato pa namestite pripomoček uStream v nosilec za polnjenje.
3. Pustite dve uri, da se popolnoma napolni.

Povezovanje pripomočka uTV 3 s pripomočkom uStream (ni potrebno za sistem »uTV 3 + uStream«)

1. Vključite pripomoček uTV 3 in pritisnite gumb za povezavo na hrbtni strani pripomočka uTV 3.
2. Če je pripomoček uStream izklopljen, pritisnite in pridržite gumb (+), da pripomoček uStream vklopite. Modra signalna lučka za zvok bo utripala.
3. Ko je povezava uspešno vzpostavljena, modra signalna lučka za zvok na pripomočkih uStream in uTV 3 neha utripati.

Predvajanje zvoka iz televizorja

1. Začnite predvajanje v televizorju.
2. Prilagodite glasnost v pripomočku uTV 3 na srednjo ali visoko stopnjo.
3. Z gumboma za glasnost na pripomočku uStream (+/–) lahko nekoliko prilagodite glasnost.

Začasna zaustavitev predvajanja

Če želite začasno ustaviti pretočni prenos in poslušati pogovor, pritisnite gumb (A), da začasno ustavite pretočni prenos. Za nadaljevanje pretočnega prenosa znova pritisnite gumb (A).

Zaustavitev predvajanja


Če želite zaustaviti predvajanje v napravi in preklopiti nazaj na običajne programe poslušanja, pritisnite gumb za dostop (A) in ga držite dve sekundi.

-  Med pretočnim prenašanjem ni mogoče spreminjati programov slušnih aparatov.
-  Če povezave po opisanih korakih ni mogoče vzpostaviti, se obrnite na vašega slušnega akustika.
-  Če želite poslušati stereo glasbo iz naprave, mora ta podpirati profil A2DP/»Stereo slušalke«.
-  Zmogljivost pretočnega prenašanja s pripomočkom uStream je štiri ure (če je baterija popolnoma napolnjena).

Uporaba pripomočka uStream s pripomočkom uMic

Če imate pripomoček uMic, lahko:

- Pretočno prenašate zvok od osebe ali iz naprave. oseba s slušnim aparatom govorec

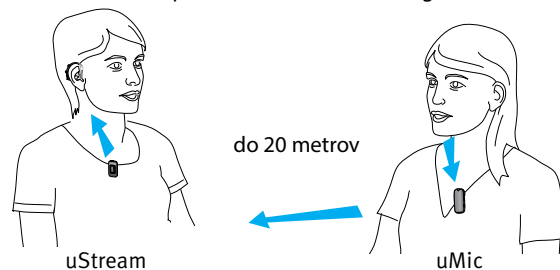

Vzpostavlanje povezave med pripomočkoma uMic in uStream

1. Če je pripomoček uMic izklopljen, pritisnite in pridržite gumb (+), da pripomoček uMic vklopite. Držite gumb (+), dokler modra signalna lučka za zvok utripa.

2. Če je pripomoček uStream izklopljen, pritisnite in pridržite gumb (+), da pripomoček uStream vklopite. Modra signalna lučka za zvok bo utripala.
3. Ko je povezava uspešno vzpostavljena, modra signalna lučka za zvok na pripomočkih uStream in uMic neha utripati.

Predvajanje zvoka iz pripomočka uMic

1. Pripomoček uMic pripnite na osebo ali ga postavite v bližino vira zvoka, denimo zvočnika ali televizorja.
2. Prilagodite glasnost v pripomočku uMic na srednjo ali visoko stopnjo.
3. Z gumboma za glasnost na pripomočku uStream (+/-) lahko nekoliko prilagodite glasnost.

Začasna zaustavitev predvajanja

Če želite začasno ustaviti pretočni prenos, pritisnite gumb (A), da začasno ustavite pretočni prenos. Za nadaljevanje pretočnega prenosa znova pritisnite gumb (A).

Zaustavitev predvajanja

Če želite zaustaviti predvajanje v napravi in preklopiti nazaj na običajne programe poslušanja, pritisnite gumb za dostop (A) in ga držite dve sekundi.

-  Med pretočnim prenašanjem ni mogoče spreminjati programov slušnih aparatov.
-  Če povezave po opisanih korakih ni mogoče vzpostaviti, se obrnite na vašega slušnega akustika.
-  Zmogljivost pretočnega prenašanja s pripomočkom uStream je štiri ure (če je baterija popolnoma napolnjena).

Upravljanje več zvočnih virov, povezanih s pripomočkom uStream

Ko je zvočni vir povezan s pripomočkom uStream, vaš slušni aparat samodejno preklopijo na posebne programe pretočnega prenašanja.

Povezana pa sta lahko dva zvočna vira Bluetooth.

Govorjeni kazalniki stanja in signalna lučka vas obveščajo o povezanih virih.

-  Telefonski klic ima vedno prednost. Ton zvonjenja boste slišali tudi med poslušanjem drugih zvočnih virov. Če klic zavrnete ali prekinete, se bo pretočni prenos zvoka nadaljeval.
-  Dokler je kateri koli zvočni vir povezan s pripomočkom uStream, programov slušnih aparatov z gumbom za dostop (A) ni mogoče spreminjati.
-  Če želite poslušati glasbo iz povezanega mobilnega telefona, morate glasbo najprej začeti predvajati na vašem telefonu. Predvajanja ni mogoče začeti s pripomočkom uStream.


Izbiranje med več viri s pripomočkom uStream

Ko je povezan samo en zvočni vir (denimo oddajnik Bluetooth), vsak pritisk gumba za dostop (A) začasno ustavi ali nadaljuje predvajanje iz zvočnega vira. Predvajanje glasbe lahko popolnoma ustavite, če pritisnete gumb za dostop (A) in ga držite dve sekundi. V tem primeru morate predvajanje znova začeti z glasbeno napravo.

Do več zvočnih virov lahko dostopate v zaporedju s pritiskanjem gumba za dostop (A). Z vsakim pritiskom pripomoček uStream izbere naslednji povezan vir po vnaprej določenem vrstnem redu.

Če vir ni povezan, ga bo pripomoček uStream preskočil in nadaljeval z naslednjim virom.

Vsak povezan zvočni vir ima določeno mesto v zaporedju, kot je prikazano na spodnji shemi.

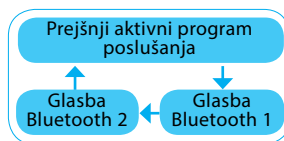

Brisanje seznanjenih naprav Bluetooth

Če z eno od seznanjenih naprav naletite na težave ali če se naprava ne povezuje več s pripomočkom uStream, lahko seznanjeno napravo izbrišete iz pripomočka uStream.

1. Pridržite gumb za povečanje glasnosti (+) in vklopite pripomoček uStream.
2. Gumb za povečanje glasnosti (+) sprostite šele po približno desetih sekundah, ko hitro utripajoča modra signalna lučka začne svetiti zeleno.
3. Pred vnovičnim seznanjanjem izbrišite tudi seznanjeni pripomoček uStream v mobilnem telefonu.
4. Ponovite postopek seznanitve.

 Če seznanjene naprave Bluetooth izbrišete, se z njimi ni več mogoče povezati. Za vnovično povezavo z njimi boste morali še enkrat izvesti postopek seznanitve.

Vodnik za odpravljanje težav

Vzrok	Mogoča rešitev
Med seznanjanjem prek povezave Bluetooth moja druga naprava zahteva kodo. Kaj moram vnesti?	
Koda za seznanitev je zahtevana pri prvi povezavi pripomočka uStream z napravo Bluetooth (seznanitev):	Koda za seznanitev pripomočka uStream je »0000« (štiri ničle).

Med pretočnim prenašanjem zvoka prek pripomočka uStream slišim prekinitev.

Naprava Bluetooth je predaleč stran ali v zadnjem žepu (zakrivanje s telesom):	Najdaljša razdalja za normalno delovanje je 5–10 m, naprave Bluetooth pa naj bodo pred vami:
Pripomoček uStream po vklopu dve minuti išče znane naprave:	Po dveh minutah pripomoček uStream ustavi iskanje in prekinitev se bodo ustavile:
Če je telefon povezan z drugimi napravami, denimo z računalnikom, morda ne more neprekinjeno pretočno prenašati glasbe:	Če telefon Bluetooth uporabljate kot predvajalnik glasbe, prekinite njegovo povezavo z drugimi napravami, kot so računalniki:

Vzrok	Mogoča rešitev
-------	----------------

Glasba ali glasnost telefonskega pogovora sta preglasna ali pretiha:

Različni zvočni viri imajo različne stopnje glasnosti:	Če želite spremeniti glasnost telefona ali katerega drugega zvočnega vira v pripomočku uStream, najprej uporabite gumb za glasnost na ustrezni zunanji napravi, nato pa s pripomočkom uStream napravite še manjše popravke:
--	---

Imam težave z razumevanjem telefonskega pogovora v hrupnem okolju:

Mikrofoni slušnega aparata so nastavljeni previsoko med klicem:	Zmanjšajte hrup iz okolice. Pritisnite gumb za zmanjšanje glasnosti in ga držite dve sekundi, nato pa z gumbom za glasnost na telefonu povečajte glasnost telefona:
---	---

Klicatelj me sliši, jaz pa njega ne.

Klic je bil prenesen v vaš telefon:	V telefonskem meniju ali z dolgim pritiskom gumba za dostop (A) prenesite klic nazaj v pripomoček uStream:
-------------------------------------	--

Nekateri telefoni ne uporabijo pripomočka uStream, če klic sprejmete s telefonskim gumbom:	Klic vedno sprejmite s pritiskom gumba za dostop (A):
--	---

Vzrok	Mogoča rešitev
-------	----------------

Telefon ali druga naprava Bluetooth ne prepozna več pripomočka uStream, s katerim je že bila vzpostavljena povezava:

Če po dveh minutah ne najde nobene naprave, pripomoček uStream zaradi varčevanja z energijo ustavi iskanje:	Izklopite pripomoček uStream, počakajte, da se izklopi rdeča signalna lučka, nato pa ga znova vklopite:
---	---

Napravi sta predaleč narazen:	Napravi približajte na razdaljo enega metra in poskusite znova:
-------------------------------	---

Pripomoček uStream je lahko seznanjen z največ šestimi različnimi napravami Bluetooth. Če je notranji pomnilnik poln, lahko nove seznanitve prepišejo prejšnje:	Ponovite seznanitev med pripomočkom uStream in napravo Bluetooth, ki je bila prepisana:
---	---

Seznanitev je bila izbrisana:	Ponovite seznanitev med pripomočkom uStream in napravo Bluetooth, ki je bila izbrisana:
-------------------------------	---

Ne uporabljam pretočnega prenosa, slušni aparati pa vseeno stalno preklaplajo med programom pretočnega prenosa in običajnim programom slušnega aparata:

Vaš telefon pošilja zvoke v pripomoček uStream zaradi dohodnih sporočil SMS ali e-pošte:	V telefonskem meniju onemogočite systemske zvoke za opomnike, alarme, sporočila SMS itd:
--	--

Vzrok	Mogoča rešitev
Vklapljeni so toni telefonskih tipk:	V telefonskem meniju izklopite tone telefonskih tipk.
V slušnem aparatu slišim tone ob pritisku telefonskih tipk.	
V telefonu so morda omogočeni toni ob pritisku tipk:	Izklopite tone ob pritisku tipk in potrditvi v vašem telefonu. Oglejte si uporabniški priročnik vašega telefona.

Vsakič, ko vklopiam telefon, se zažene predvajalnik glasbe.

Pri nekaterih telefonih je to običajno in pripomoček uStream ni vzrok temu:	Nekatere telefone je mogoče konfigurirati, da predvajalnika glasbe ne zaženejo samodejno. Pritisnite in pridržite gumb za dostop (A), da ustavite pretočni prenos. Ali pa predvajalnik glasbe zaustavite v telefonskem meniju, ko je telefon povezan:
---	---

V avtomobilu se povezava med pripomočkom uStream in mojim telefonom nenavadno obnaša.

Avtomobilski sistem Bluetooth se poveže z vašim telefonom:	Prekinite povezavo med avtomobilskim sistemom in vašim telefonom.
--	---

Ko sprejemem dohodni telefonski klic, ga ne slišim v slušnih aparatih:

Vzrok	Mogoča rešitev
Nekateri telefoni ne uporabijo pripomočka uStream, če klic sprejmete s telefonskim gumbom:	Klic vedno sprejmite s pritiskom gumba za dostop (A) na pripomočku uStream.
Telefon zvoni, vendar signalna lučka ne sveti modro in v slušnih aparatih se ne sliši zvonjenja.	
Vmesnik Bluetooth v telefonu je onemogočen:	Po navodilih v uporabniškem priročniku za telefon omogočite vmesnik Bluetooth:
Pripomoček uStream in vaš telefon nista povezana:	1. Onemogočite funkcijo Bluetooth v telefonu in jo nato znova vklopite. 2. Izklopite in spet vklopite pripomoček uStream, da se zažene znova. Funkcija Bluetooth v pripomočku uStream se bo samodejno znova vklopila: 3. Aktivirajte pripomoček uStream, tako da ga izberete v telefonskem meniju »Aktivna naprava«. 4. Zmanjšajte razdaljo med pripomočkom uStream in telefonom:
Pripomoček uStream ni seznanjen s telefonom:	Upoštevajte postopek seznanitve prek povezave Bluetooth v teh navodilih:

Vzrok	Mogoča rešitev
Razdalja med pripomočkom uStream in telefonom je prevelika.	Pripomoček uStream mora biti pripet na oblačila. Razdalja do telefona naj bo krajša od 10 m.
Telefon zvoni, signalna lučka sveti modro, vendar se v slušnih aparatih ne sliši zvonjenja.	
Pripomoček uStream je zunaj dosega slušnih aparatov.	Pripomoček uStream mora biti pravilno pripet na oblačila in največ 40 cm oddaljen od slušnih aparatov.
Telefon je nastavljen na vibriranje.	Omogočite zvonjenje v telefonu.
Če en telefonski klic že poteka, drugega klica ni mogoče prepoznati.	Prekinite prvi telefonski klic in nato sprejmite drugega.

Moj telefon zvoni, vendar pripomoček uStream ne izgovori imena klicatelja.

Funkcija prepoznavanja klicatelja ni na voljo ali ni omogočena v vašem telefonu.	Oglejte si uporabniški priročnik vašega telefona in preverite razpoložljivost te funkcije.
S pripomočkom uStream sta povezana dva telefona.	Če sta povezana dva telefona, je funkcija prepoznavanja klicatelja na voljo samo v telefonu, ki je bil zadnji seznanjen s pripomočkom uStream.

Vzrok	Mogoča rešitev
Funkcija prepoznavanja klicatelja je morda izklopljena.	Prosimo vašega slušnega akustika, da omogoči funkcijo prepoznavanja klicatelja v pripomočku uStream.
Med telefonskim klicem me oseba na drugi strani slabo sliši.	
Odprtina za mikrofona na pripomočku uStream je morda prekrita.	Preverite, ali odprtine za mikrofona morda ne prekriva del vašega telesa ali obleke oziroma ali so morda zamašene z umazanijo.
Pripomoček uStream morda ni nameščen pravilno.	Preverite, ali je pripomoček uStream varno pripet na vaša oblačila in oddaljen največ 40 cm od slušnega aparata.
Pripomoček uStream se morda drgne ob oblačila.	Med govorjenjem se manj premikajte.
Hrup iz okolice je morda preglasen.	Pomaknite pripomoček uStream bližje ustom. Klicateljem priporočajte, naj povečajo glasnost v telefonu.
Pripomoček uStream se ne odziva oziroma ob vklopu ne sveti signalna lučka.	
Pripomoček uStream je morda popolnoma izprazen.	Polnite pripomoček uStream vsaj eno uro.

Vzrok	Mogoča rešitev
Težava je lahko v programski opremi.	Izključite pripomoček uStream, počakajte 30 sekund, nato pa ga znova vklopite.

Čas delovanja pripomočka uStream se je občutno skrajšal.

Baterija običajno potrebuje nekaj ciklov polnjenja, preden doseže največjo zmogljivost.	Ob prvem polnjenju pripomoček uStream polnite vsaj tri ure. Nov pripomoček uStream trikrat popolnoma izpraznite.
---	--

Med pretočnim prenašanjem zvoka prihaja do prekinitev.

Pripomoček uStream je predaleč stran od slušnih aparatov med pretočnim prenašanjem.	Pripomoček uStream mora biti pripet na oblačila in največ 40 cm oddaljen od slušnih aparatov.
Signal Bluetooth je zunaj dosega.	Naprava Bluetooth mora biti v območju delovanja.

Ne slišim predstavitvenega zvoka.

Slušni aparat ni pravilno nameščen.	Preverite, ali so slušni aparati pravilno vstavljeni.
Pripomoček uStream ni pravilno nameščen oziroma je izklopljen.	Pripomoček uStream mora biti pripet na oblačila in največ 40 cm oddaljen od slušnih aparatov. Preverite, ali je pripomoček uStream napolnjen in vklopljen.

Ob kakršnih koli težavah, ki niso omenjene v teh navodilih, se obrnite na vašega slušnega akustika.

Opozorila


-  Pred uporabo pripomočka Unitron uStream preberite informacije na naslednjih straneh.

Opozorila o nevarnostih

-  To napravo hranite zunaj dosega domačih živali in otrok, mlajših od 3 let.
-  Uporabljajte samo slušne aparate, ki jih je posebej za vas programiral vaš slušni akustik.
-  Prepovedano je kakršno koli spreminjanje naprave, ki ga podjetje Unitron ni izrecno dovolilo.
-  Osebe z aktivnimi medicinskimi vsadki (kot so srčni spodbujevalniki, defibrilatorji itd.) morajo biti pri uporabi te naprave še posebej previdne. O podrobnostih se pogovorite z vašim slušnim akustikom.
-  Če pripomoček uStream odprete, ga lahko poškodujete. Če se pojavijo težave, ki jih ni mogoče odpraviti z upoštevanjem mogočih rešitev v razdelku odpravljanja težav v teh navodilih, se posvetujte z vašim slušnim akustikom.

- ⚠ Ta izdelek ima vdelano baterijo, ki je ni mogoče zamenjati. Ne poskušajte odpirati izdelka ali odstranjevati baterije, saj lahko poškodujete sebe in izdelek.
- ⚠ Električne komponente zavržite skladno z lokalnimi predpisi.
- ⚠ Naprave ne uporabljajte na eksplozivnih območjih (rudniki ali industrijska območja, kjer obstaja nevarnost eksplozije; okolja, bogata s kisikom, ali območja, kjer se uporabljajo vnetljivi anestetiki) ali na območjih, kjer je uporaba elektronske opreme prepovedana.
- ⚠ Zunanje naprave lahko priključite samo, če so bile preskušene skladno z ustreznimi standardi IECXXXXX. Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobrilo podjetje Unitron.
- ⚠ Uporaba kablov pripomočka uStream, ki je kakor koli drugačna od namenske uporabe (če si kabel USB denimo ovijete okoli vratu), lahko povzroči telesne poškodbe.
- ⚠ Med upravljanjem delovnih strojev zagotovite, da se noben del pripomočka ne zatakne v stroju.

- ⚠ Priključek mini-USB lahko uporabljate samo za opisan namen.
- ⚠ Pozor: električni udar. V električne vtičnice ne vstavljajte samo priključka.

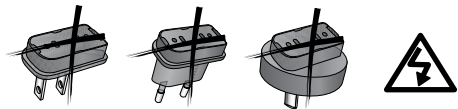

- ⚠ Zaradi varnostnih razlogov uporabljajte samo polnilnike, ki jih je priložilo podjetje Unitron, ali stabilizirane polnilnike z nazivno enosmerno napetostjo 5 V, najmanj 500 mA.

Informacije o varnosti izdelka

- ⚠ Pri vašem slušnem akustiku preverite združljivost vaših slušnih aparatov.
- ⚠ Pripomoček uStream zaščitite pred prekomerno vlago (kopanje, plavanje), vročino (grelna telesa, armaturna plošča v avtomobilu) in neposrednim stikom s kožo, ko se potite (telovadba, fitnes, šport).
- ⚠ Varujte napravo pred padci na tla. Padec na trdo površino lahko poškoduje napravo.

- ⚠ Posebni medicinski ali zobozdravstveni pregledi, vključno s spodaj opisanim sevanjem, lahko škodljivo vplivajo na pravilno delovanje pripomočka. Pred medicinskim ali zobozdravstvenim pregledom z rentgenskimi žarki (tudi CT-pregled) ali drugimi medicinskimi pregledi MRI/NMRI, ki ustvarjajo magnetna polja, pripomoček odstranite in ga hranite zunaj prostora/območja pregleda.
- ⚠ Zaščitite napravo ter rezo za polnjenje in napajanje pred umazanijo in prahom.
- ⚠ Pripomoček uStream čistite z vlažno krpo. Za čiščenje pripomočka uStream nikoli ne uporabljajte gospodinjskih čistilnih sredstev (pralni prašek, milo itd.) ali alkohola.
- ⚠ Za sušenje pripomočka uStream nikoli ne uporabljajte mikrovalovne pečice ali drugih grelnih naprav.
- ⚠ Digitalno kodirana tehnologija induktivnega prenašanja, ki se uporablja v pripomočku uStream, je izjemno zanesljiva in neobčutljiva na skoraj vse motnje drugih naprav. Vseeno pa se morate zavedati, da morajo biti slušni

sistemi, ki se uporabljajo v bližini računalniške opreme, večjega elektronskega sistema ali drugih močnih elektromagnetnih polj, vsaj 60 cm oddaljeni od motilne naprave, da je zagotovljeno primerno delovanje.

- ⚠ Naprava naj bo vsaj 10 cm stran od kakršnih koli magnetov.
- ⚠ Zaradi varnostnih razlogov polnite pripomoček uStream samo s polnilniki, ki jih je priložilo podjetje Unitron, ali s polnilniki s potrdilom USB (> 500 mA).
- ⚠ V pripomoček uStream ne priključujte kabla USB ali zvočnega kabla, daljšega od 3 metrov.
- ⚠ Ko pripomočka uStream ne uporabljate, ga izklopite in shranite na varno.

Druge pomembne informacije

- ⚠ Visokonapetostna elektronska oprema, večji elektronski sistemi in kovinske strukture lahko vplivajo na doseg delovanja in ga občutno zmanjšajo.
- ⚠ Če se slušni aparat zaradi neobičajnih motenj ne odziva na pripomoček uStream, se odmaknite iz motečega območja.

Informacije o simbolih in njihova razlaga



Z znakom CE podjetje Unitron potrjuje, da je ta njegov izdelek skupaj z dodatno opremo skladen z zahtevami Direktive 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih ter Direktive 2014/53/EU o radijskih in telekomunikacijskih oddajnikih.

Številke, ki sledijo znaku CE, so oznake certifikacijskih organov, na katere se je Unitron obrnil skladno z zgoraj navedeno direktivo.



Ta simbol sporoča, da je pomembno, da uporabnik prebere in upošteva informacije, vsebovane v teh navodilih za uporabo.



Ta simbol sporoča, da je pomembno, da uporabnik upošteva opozorila, vsebovana v teh navodilih za uporabo.



Pomembne informacije o ravnanju z izdelkom in njegovi varnosti.



Avstralska in novozelandska skladnostna oznaka v zvezi z elektromagnetno združljivostjo in radijskimi komunikacijami.



Znak za avtorske pravice



Ob tem simbolu morata biti navedena ime in naslov pooblaščenega zastopnika v Evropski skupnosti.



Ob tem simbolu morata biti navedena ime in naslov proizvajalca, ki to napravo daje na tržišče.

Pogoji za delovanje:

Ta pripomoček je izdelan tako, da deluje brez težav in omejitev, če se uporablja na predviden način, razen če v teh navodilih za uporabo ni navedeno drugače.

Od 0 do 45 °C in relativna vlažnost manj kot 95 % (nekondenzirajoča).

Pogoji za prevoz:

Temperatura: Od -20 do +60 °C (od -4 do +140 °F).

Vlažnost: Do 90 % (nekondenzirajoča).



Simbol s prečrtanim smetnjakom opozarja, da tega pripomočka ne smete odvreči kot komunalni odpadke. Stare oziroma nerabljene pripomočke oddajte centru za obdelavo odpadne elektronske opreme ali pa jih prepustite slušnemu akustiku, ki jih bo oddal naprej. Pravilna odstranitev varuje okolje in zdravje.



Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so zaščitene blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Vsakršna uporaba teh znamk s strani podjetja Unitron je v okviru dovoljenj. Druge znamke in trgovska imena so last ustreznih oseb.



Google Play je blagovna znamka družbe Google Inc.



Apple in logotip Apple sta blagovni znamki družbe Apple Inc., registrirani v Združenih državah in drugih državah. App Store je storitvena znamka družbe Apple Inc.

Informacije o skladnosti

Izjava o skladnosti

Podjetje Unitron Hearing izjavlja, da je ta njegov izdelek skladen z zahtevami Direktive 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih in Direktive 2014/53/EU o radijski opremi. Celotno besedilo izjav o skladnosti je na voljo pri proizvajalcu.

Opomba 1:

Ta pripomoček je skladen s 15. delom Pravilnika Zvezne komisije za komunikacije in specifikacijo RSS-210 kanadskega Ministrstva za industrijo. Za delovanje veljata ta dva pogoja:

- 1) ta naprava ne sme škodljivo vplivati na delovanje drugih naprav in
- 2) ta naprava mora sprejeti interferenco drugih naprav, vključno s takšno, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje.

Opomba 2:

Zaradi sprememb oziroma prilagoditev te naprave, opravljenih brez izrecnega soglasja podjetja Unitron, lahko dovoljenje Zvezne komisije za komunikacije za uporabo te naprave postane neveljavno.

Opomba 3:

Pri preizkušanju te naprave je bilo ugotovljeno, da je naprava skladno s 15. delom Pravilnika Zvezne komisije za komunikacije in standardom ICES-003 kanadskega Ministrstva za industrijo znotraj mejnih vrednosti, ki veljajo za digitalne naprave razreda B. Namen teh omejitev je zagotavljanje ustreznе zaščite pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih prostorih. Ta naprava ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo. Če se ne namesti in ne uporablja skladno z navodili, lahko škodljivo vpliva na radijske komunikacije. Kljub temu ni zagotovila, da se pri posamezni namestitvi motnje ne bodo pojavile.

Če ta naprava povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar lahko ugotovite z vklopom in izklopom opreme, lahko uporabnik poskusi odpraviti motnje z enim ali več od teh ukrepov:

Obrnite ali premestite sprejemno anteno.

Povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom.

Priključite napravo v vtičnico, ki ni v istem tokokrogu kot tista, na katero je priključen radijski ali televizijski sprejemnik.

Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega serviserja radijskih/televizijskih sprejemnikov.



Avstralija: Dobaviteljeva kodna oznaka N15398

Nova Zelandija: Dobaviteljeva kodna oznaka Z1285

Povratne informacije uporabnika

Zapišite svoje posebne potrebe ali težave in zapiske prinesite s seboj ob prvem kontrolnem pregledu po prejetju slušnega aparata.

S tem boste slušnemu akustiku omogočili, da vam pomaga rešiti težave.



☐	_____

☐	_____

☐	_____

☐	_____

☐	_____

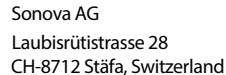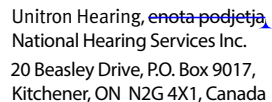[illegible]

Seznam družb iz skupine
Unitron najdete na
www.unitron.com





Distributer

unitron.com

