

## Iniziare ad utilizzare uStream



### 1. Interruttore On -Off

**Accensione:** spostare l'interruttore verso il basso per accendere il dispositivo. Il led della batteria diventerà **verde** per 2 secondi.

**Spegnimento:** spostare l'interruttore verso l'alto per spegnere il dispositivo. L'indicatore della batteria lampeggerà e diventerà **Rosso** fisso per 2 secondi.

Per risparmiare batteria disattivare uStream quando non è in uso.

### 2. Pulsanti controllo volume

Premete + per aumentare il volume dei vostri apparecchi acustici.

Premete - per ridurre il volume dei vostri apparecchi acustici.

Ogni volta che regolate questo controllo sentirete un breve bip. All'impostazione raccomandata sentirete un solo bip 🎵. Quando raggiungete l'impostazione minima o massima, sentirete 2 bip 🎵🎵.

Durante la trasmissione, premete + per incrementare il volume e - per ridurre il volume dei suoni trasmessi.

### 3. Pulsante Accedi

**Premete brevemente:**

- Premere questo pulsante per rispondere a una telefonata.
- Durante una telefonata, premere questo pulsante per terminare la chiamata.
- Premete questo pulsante per passare al programma successivo nella vostra sequenza di programmi. Sentirete una serie di bip ogni volta che premete questo pulsante. Il numero dei bip corrisponde al numero del programma.

**Mantenete premuto:**

- Mantenete premuto questo pulsante per rifiutare una chiamata in arrivo.


### Bloccaggio di uStream

È possibile bloccare i comandi di uStream per evitare modifiche accidentali dei programmi o del volume.

Premere contemporaneamente i pulsanti + e - per bloccare o sbloccare uStream.


Quando uStream è bloccato potete rispondere alle chiamate premendo il pulsante Accedi.

## Utilizzare uStream

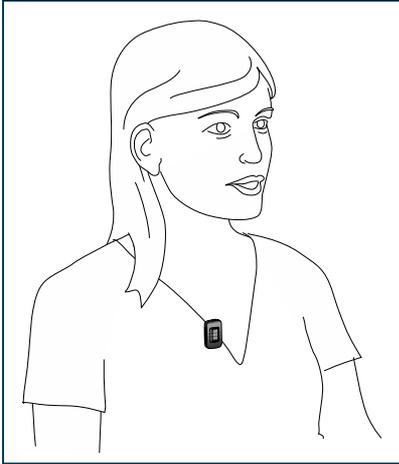

Si raccomanda di fissare uStream ai vostri abiti ad una distanza ottimale di 20 cm. La funzionalità è garantita fino a 40 cm di distanza.

## Abbinare uStream ai dispositivi Bluetooth®

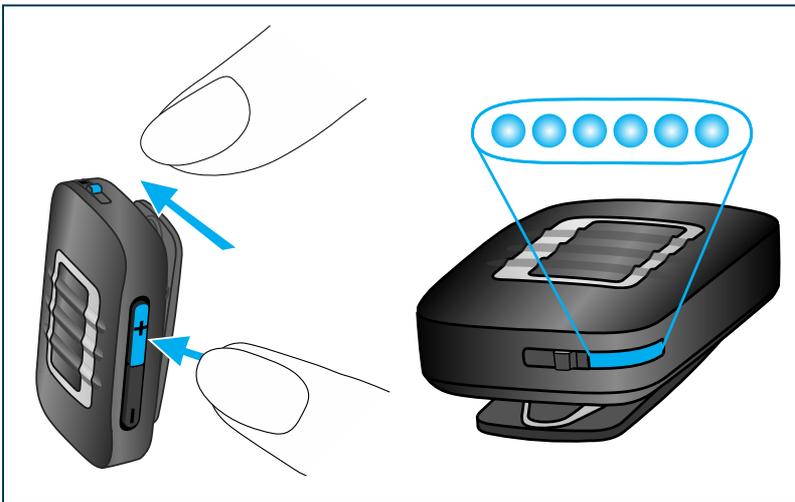

Disattivare uStream. Mantenere premuto il tasto (+) del controllo volume e attivare uStream. Quando il led **Blu** inizia a lampeggiare, uStream è pronto per l'abbinamento con un altro dispositivo Bluetooth. Se richiesto, inserire il codice di abbinamento 0000.

## Regolazione degli apparecchi acustici con l'app uControl

Potete regolare i vostri apparecchi acustici attraverso l'app uControl. L'app è disponibile sia per iPhone che per telefoni Android e vi consente di controllare alcuni parametri degli apparecchi acustici come il volume e il programma in uso.

L'app uControl è disponibile negli store Apple e Google Play.

## Utilizzare uStream per le telefonate

**Preparare:** Abbinare uStream al vostro telefono e agganciarlo all'abito a circa 20 cm dalla vostra bocca. Non portare uStream sotto ai vestiti durante le telefonate perché l'interlocutore potrebbe avere difficoltà ad udire la vostra voce.

**Accettare una chiamata:** Quando sentite lo squillo nei vostri apparecchi acustici, premete il pulsante Accedi per rispondere alla chiamata. L'audio sarà trasmesso direttamente agli apparecchi e la vostra voce sarà catturata dai microfoni posti su uStream.

**Effettuare una chiamata:** Per effettuare una chiamata, componete il numero dal vostro telefono. Gli apparecchi acustici attiveranno automaticamente il programma uStream per le telefonate.

**Terminare una chiamata:** Premete il pulsante Accedi per terminare una chiamata. Durante le telefonate, l'indicatore luminoso emetterà una luce continua [Blu](#).


## Utilizzare uStream per lo streaming Bluetooth

In primo luogo abbinare il dispositivo Bluetooth a uStream

Ogni volta che portate uStream con gli apparecchi acustici, accendete il dispositivo e premete play per udire l'audio negli apparecchi.

Durante la trasmissione, l'indicatore luminoso emette una luce continua [Blu](#).

## Batteria e indicatori luminosi della batteria

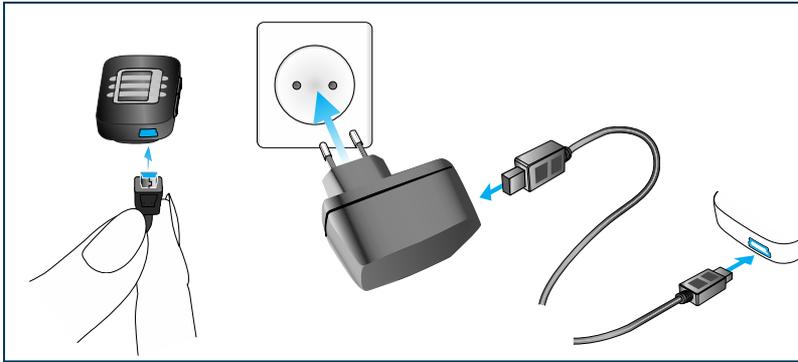

**Ricarica batterie:** Per ricaricare le batterie collegare il cavo USB sul fondo di uStream.

Normalmente sono necessarie 2 ore per ricaricare completamente la batteria in base alla carica rimasta.

Una batteria completamente carica consente fino a 4 ore di streaming continuo. Se utilizzate solamente la funzione remota, la batteria può durare circa 1 settimana.

Significato delle luci degli indicatori luminosi:

- Luce fissa **Rosso**: ricarica
- Luce fissa **verde**: ricarica completa
- **Verde** per 2 secondi: Accensione
- Luce fissa **Rosso**: Spegnimento
- ● ● Lampeggio lento **verde**: operazione normale
- ● ● Lampeggiamento breve **Rosso**: <10% batteria rimasta: ricaricare il dispositivo.
- ● ● Lampeggiamento breve **Rosso** (bloccato) o **verde** (sbloccato): attivare/disattivare blocco
- Luce fissa **Blu**: Telefono Bluetooth o streaming musica
- ● ● Lampeggiamento breve **Blu**: un dispositivo Bluetooth connesso
- ● ● ● ● Lampeggiamento doppio **Blu**: due dispositivi Bluetooth connessi
- ● ● ● ● ● Lampeggiamento rapido **Blu**: Abbinamento Bluetooth
- Luce fissa **rosa**: Riproduzione audio
- Nessuna luce dopo l'accensione: batteria scarica; caricare per almeno 2 ore

## Notifiche vocali:

uStream comunicherà con voi attraverso gli apparecchi acustici per informarvi sul suo stato, come la carica della batteria e per fornirvi l'identificazione del chiamante.

## Cura di uStream

- Se il dispositivo dovesse bagnarsi, fatelo asciugare naturalmente per 24 ore.
- Proteggete il dispositivo dal calore eccessivo (asciugacapelli, cassetti portaoggetti e cruscotto).
- Non fate cadere il dispositivo e non urtatelo contro superfici dure.

© Bluetooth è un marchio registrato di Bluetooth SIG Inc.  
Per ulteriori informazioni consultate il manuale d'uso di uStream o il vostro audioprotesista.