

## Iniziare ad utilizzare Remote Control 2



### 1. Interruttore On -Off (blocco)

**Accensione:** Fate scorrere l'interruttore in posizione on per accendere il telecomando. L'indicatore luminoso lampeggia per 2 secondi.

**Spegnimento:** Fate scorrere l'interruttore verso il basso per spegnere il telecomando. Assicuratevi di spegnere il telecomando quando non è in uso.

### 2. Pulsanti controllo volume


Premete + per aumentare il volume dei vostri apparecchi acustici.

Premete - per ridurre il volume dei vostri apparecchi acustici.

Ogni volta che regolate questo controllo sentirete un breve bip. All'impostazione raccomandata sentirete un solo bip 🎵. Quando raggiungete l'impostazione minima o massima, sentirete 2 bip 🎵🎵.

### 3. Pulsante cambio programma

Premete questo pulsante per passare al programma successivo nella vostra sequenza di programmi.

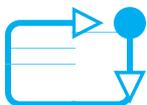

SoundNav programma (1 bip 🎵) - programma di avvio

Telefono programma (2 bip 🎵🎵)

Fate riferimento alla guida dei vostri apparecchi acustici per maggiori dettagli sul programma/i.

### 4. Tasto Home

Premete questo pulsante per portare entrambi gli apparecchi al programma di avvio, ovvero al programma SoundNav. Sentirai un bip 🎵ogni volta che premi questo pulsante.

### Utilizzo del telecomando

Prima di utilizzare il telecomando, accendete gli apparecchi acustici per assicurarvi che siano in grado di ricevere gli input dal telecomando.

Il vostro telecomando è progettato per essere comodamente utilizzato nelle vostre mani alla distanza massima di un braccio.

Non dovete puntare il telecomando verso i vostri apparecchi acustici.


Posizionare il telecomando accanto o troppo vicino ai vostri apparecchi acustici, potrebbe diminuire l'efficacia dello stesso.

## Sportellino pila

**Batterie di ricambio:** AAA

**Batteria scarica:** Se l'indicatore luminoso del telecomando lampeggia **Giallo** o **Rosso**, allora il telecomando ha la batteria scarica e deve essere sostituita. L'avviso luminoso comparirà ogni volta che accendete il telecomando.

Lo sportellino batteria si rimuove dal retro del telecomando. Inserite una nuova batteria con il polo positivo (+) vicino alla parte superiore del telecomando.

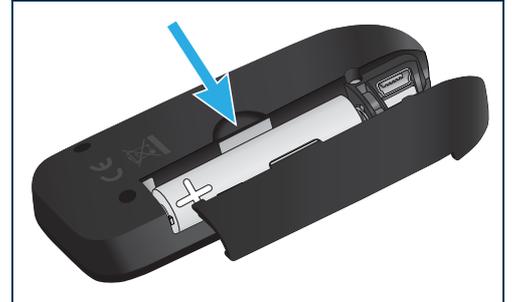

## Cura del telecomando

- Aprite il vano batteria e rimuovete la pila se non utilizzate il telecomando per periodi di tempo prolungati.
- Non utilizzate il telecomando durante il bagno o la doccia e non immergetelo in acqua.
- Se il telecomando si bagna, aprite il vano batteria e fatelo asciugare naturalmente per 24 ore.
- Proteggete il telecomando dal calore eccessivo (asciugacapelli, portaoggetti, cruscotto).
- Non fate cadere o non urtate il telecomando contro superfici dure.

Fate riferimento alla guida del telecomando o contattate il vostro audioprotesista per maggiori informazioni.